

Специальное средство по уходу за инвалидами – подушка ROHO QUADTRO SELECT. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Здесь Вы найдете информацию о том, как правильно пользоваться и обращаться с подушкой QUADTRO SELECT. Внимательно прочитайте инструкцию целиком перед началом применения подушки и сохраните ее в надежном месте. Правильная настройка подушки имеет решающее значение для защиты кожи от повреждений. Целью настройки является погружение пользователя в подушку настолько глубоко, насколько возможно. Глубокое погружение достигается за счет минимального объема воздуха в подушке наряду с тем, что ни одна часть тела пользователя не касается основы подушки. Правильная настройка и распределение давления воздуха проводится только в положении сидя и будет подробно описана ниже.

Краткое описание изделия.

Подушка QUADTRO SELECT устанавливает новые стандарты в производстве подушек для инвалидных колясок. Это действительно уникальное изделие. Помимо всех основных противопролежневых терапевтических свойств: защиты кожи, предотвращения и лечения пролежней, QUADTRO SELECT компенсирует искривления позвоночника с помощью постоянной регулировки положения пациента, наклона его тела. Каждый пользователь может подстроить ее под себя одним нажатием кнопки. Благодаря революционной технологии ISOFLO™Memory Control™ и технологии AIR IN PLACE®, подушку можно легко и быстро отрегулировать в соответствии с формой тела, и подушка сохранит выбранную конфигурацию за счет блокировки воздуха в выбранном вами количестве в каждом из четырех сегментов подушки.

Твердые сиденья под подушку.

Подушки наиболее эффективны, когда устанавливаются на твердую и ровную основу. Прогнбающиеся сиденья влияют на положение тела, поэтому компания ROHO рекомендует использовать контурные основы и твердые базы PLANAR, вставляющиеся в подушку или монтирующиеся под нее.

Меры предосторожности.

Чтобы избежать случаев неправильного применения подушки, перечисленных ниже, проверяйте свою подушку каждый день на предмет правильной настройки и функционирования.

1. Утечка воздуха из подушки приводит к неправильному положению человека, сидящего в ней (см.п.2) и уменьшению ее терапевтических свойств на пример: предотвращения возникновения пролежней. Вы должны ежедневно проверять подушку на ее функциональность.
2. В случае если в подушке осталось мало воздуха, участки в области сидалищных костей, могут коснуться основы подушки. Это значительно уменьшает терапевтическую ценность подушки и может вызвать повреждения кожи. Подушка должна быть настроена таким образом, чтобы между ее основой и сидалищной костью всегда оставалось 1,5 – 2 см.

При использовании подушкой ROHO запрещается:

1. Подвергать подушку воздействию булавок и других острых предметов;
2. Ронять на подушку горячий пепел или подвергать воздействию огня;
3. Использовать клапан надува и клапан регулировки воздуха как ручку при корректировке своего положения в коляске;
4. Протирать подушку лосьонами и иными жидкостями, содержащими масла или ланолин;
5. Использовать подушку для плавания;
6. Обработать подушку в автоклаве, поскольку закрытый клапан может способствовать росту давления внутри подушки и ее разрыву.

Список комплектующих.

1. **Поверхность подушки/ячейки:** поверхность надувной части подушки состоит из кармашков с воздухом, которые называются ячейками, а весь надувной элемент называется покрытием DRY FLOATATION.
2. **Клапан надува:** регулирует количество воздуха в подушке. Запрещается использовать его для переноски изделия.
3. **ISOFLO™Memory Control:** позволяет направлять распределение воздуха в подушке для большего контроля за положением и стабильностью тела.
4. **Эластичный, дышащий чехол:** защищает подушку и обеспечивает оптимальный терапевтический эффект.
5. **Насос ROHO:** используется для надува подушки.
6. **Инструкция по применению:** к каждой подушке ROHO прилагается инструкция по применению с рекомендациями по настройке, уходу, ремонту и гарантийному обслуживанию.
7. **Ремонтный набор:** прилагается для устранения мелких проколов.
8. **Желтый канатик:** предназначен для переноски подушки.

Установка изделия на инвалидную коляску.

Подушка QUADTRO SELECT должна быть положена на сиденье инвалидной коляски ячейками вверх. ROHO рекомендует располагать подушку клапаном ISOFLO™Memory Control вперед, хотя возможно и любое другое удобное положение. Чехол должен находиться несходящей стороной вниз. В нем предусмотрено специальное отверстие для клапана ISOFLO™Memory Control.

Настройка надувного элемента QUADTRO SELECT.

Шаг первый. Откройте клапан надува, повернув его верхнюю часть против часовой стрелки. Удостоверьтесь, что на клапане ISOFLO™Memory Control нажата зеленая кнопка (в положение «открыто»).

Шаг второй. Наденьте резиновый шланг насоса на клапан надува. Надувайте подушку до тех пор, пока ячейки не распрямятся и не раздуются.

Шаг третий. Снимите шланг насоса с клапана и закройте его, повернув по часовой стрелке.

Шаг четвертый. Сядьте на сильно надутую подушку в привычное положение с подлокотниками и правильно настроенными держателями ступней.

Шаг пятый. Засуньте руку под ягодицы, чтобы нащупать седалищную кость. В случае необходимости вам может помочь консультант или ассистент.

Шаг шестой. Не вынимая руки, другой рукой откройте клапан. По мере того, как воздух будет выходить из подушки, вы будете все больше погружаться в нее. Когда ваши пальцы коснутся основы, зажмите резиновый шланг и закройте клапан. Таким образом, между самым нижним фрагментом седалищной кости и основой подушки должно быть 1,25 – 1,7 см.

Шаг седьмой. Сядьте на подушку в таком положении, какого бы вам хотелось. В случае необходимости вам может помочь консультант или ассистент. Подождите, чтобы воздух распределился по подушке в соответствии с вашим новым положением. Закрыйте клапан ISOFLO™Memory Control, надавив на красную кнопку (в положение «закрыто»). Это изолирует объемы воздуха и создаст стабильное положение тела.

Шаг восьмой. Проверьте глубину погружения, засунув руку между подушкой и седалищной костью. Если вы решите изменить распределение воздуха в подушке для той или иной деятельности, откройте клапан ISOFLO™Memory Control, надавив на зеленую кнопку, и повторите шаги 7 и 8.

Специальные указания по настройке QUADTRO SELECT.

1. Данная подушка особенно подходит для улучшения положения тела и исправления гибких искривлений позвоночника путем постепенного изменения привычной посадки. Если вы начинаете испытывать мышечную или иную боль в новой позиции, измените настройку подушки в меньшей степени с помощью консультанта или ассистента. Затем постепенно поднастраивайте подушку, пока не достигнете желаемого положения.
2. Вы, ваш консультант или ассистент должны регулярно проверять подушку, чтобы убедиться, что она сохраняет норму надува, т.е. седалищная кость не касается сидения или в подушке нет избытка воздуха. Иначе всё терапевтическое воздействие может быть утеряно. Если вы меняете высоту над уровнем моря, вам может потребоваться повторить шаги 1 – 8.
3. Следует регулировать объем воздуха в подушке, когда клапан ISOFLO™Memory Control находится в положении «открыто» (нажата зеленая кнопка). Это необходимо для оптимального распределения воздуха в областях с максимальным давлением и риском возникновения повреждений кожи.

Чистка и дезинфекция подушек QUADTRO SELECT.

Для очистки надувного элемента QUADTRO SELECT сначала аккуратно достаньте его из чехла, предварительно убрав клапан надува вовнутрь. Сдуйте подушку, закройте клапан и поместите ее в емкость для мытья. Аккуратно протрите ячейки и промежутки между ними губкой или мягкой мочалкой. Рекомендуется использовать мягкое мыло, жидкость для мытья посуды или стиральный порошок.

Чехол стирается в стиральной машине в холодной воде. Сушка на воздухе.

Для дезинфекции используйте ткань, увлажненную бытовыми дезрастворами. Также можно дезинфицировать подушку раствором хлорки, в который ее можно положить на 10 минут. Для дезинфекции чехла используйте дезраствор на основе фенола, например LYSOL®. Дезинфекция хлоркой или в автоклаве запрещается.

Для стерилизации ROHO не рекомендует использовать температуры выше 93°C, так как они ускоряют износ подушки и могут вызвать повреждения швов. Если правила лечебного учреждения требуют стерилизации, откройте клапана и используйте наиболее низкую

температуру в течение наиболее короткого времени. Стерилизация газом предпочтительнее, нежели чем в автоклаве, однако и она тоже не рекомендуется.
Примечание: Запрещается использование лосьонов на основе масел, ланолина или дезрастворы на основе фенола, так как они могут нарушить целостность резины.

Ремонт утечек воздуха.

Следует оберегать подушку от булавок и других острых предметов, а также попадания горячего пепла или открытого огня. Если ваша подушка DRY FLOATATION подверглась проколу, вы можете починить ее с помощью ремонтного набора:

1. Положите подушку ячейками вниз и максимально ее надуйте.
2. Погрузите ее в воду, чтобы обнаружить прокол.
3. Обнаружив прокол, зафиксируйте его, вставив зубочистку в дырочку.
4. Высушите подушку.
5. Очистите поверхность вокруг прокола прилагаемой салфеткой, пропитанной спиртом и снова высушите.
6. Оторвите подложку от прилагаемой заплатки и поместите ее на отверстие.
7. Плотно прижмите заплатку к поверхности подушки, пока не будет достигнуто прочное крепление.
8. Подушка готова к дальнейшему использованию. Настройте подушку в соответствии с приведенными выше инструкциями.

Хотя заплатки не влияют на функциональность подушки, следует периодически проверять их на предмет функционирования. Если заплатка по тем или иным причинам не держится, или же отверстие слишком велико для того, чтобы его заклеить, обратитесь к местному представителю ROHO. Решение о том, подлежит ли изделие ремонту, остается на усмотрение компании ROHO.

Возврат изделия.

Любой возврат подушки должен быть заранее согласован с компанией ROHO. За возврат взимается определенная пеня. Если вы живете не в США, обратитесь к местному представителю компании ROHO.

Гарантийное обслуживание.

Гарантия компании ROHO действует в течение 12 месяцев с даты покупки и распространяется на дефекты в материалах и недочеты, допущенные при изготовлении подушки. В течение гарантийного периода за разумный срок с момента доставки изделия изготовителю будет бесплатно устранен любой дефект в материалах или допущенный при производстве. Доставка изделия изготовителю для ремонта и возврат подушки пользователю осуществляется за счет пользователя.

Гарантия не распространяется на изделия, которые были повреждены вследствие неправильного обращения или же по случайности. Также не подлежат гарантийному обслуживанию изделия, пострадавшие в результате стихийных бедствий, пожара, аварий и т.д.

Ремонт изделия, не попадающего под действие гарантии, производится за минимальную стоимость плюс транспортные расходы за счет пользователя. Расчет за ремонт производится по письменному запросу пользователя, и тогда дальнейший ремонт производится только после подтверждения со стороны пользователя.