



СТАБИЛО

ВАКУУМНАЯ

ТЕХНОЛОГИЯ

Официальный представитель
на территории России



Группа компаний
RehaТехник

Проектирование, адаптация технических средств
реабилитации для людей с ограниченными возможностями

г. Москва, ул. Шоссе Энтузиастов, д. 56

тел.: +7(495) 968-92-48


факс.: +7(495) 786-99-17




e-mail: info@reha-teh.ru

STABILO

это система стабилизации из подушек и маграсов, которая выполняет свою функцию при помощи создания нужной формы вакуумом. Специальный насос помогает выкачать воздух из Stabilo, чтобы упрочнить подушку и создать нужную форму. Форма и твердость Stabilo можно изменять нужное количество раз без особых усилий.

Stabilo изготовлен на польском заводе в Кракове, что позволяет нам контролировать качество на каждом этапе производства.

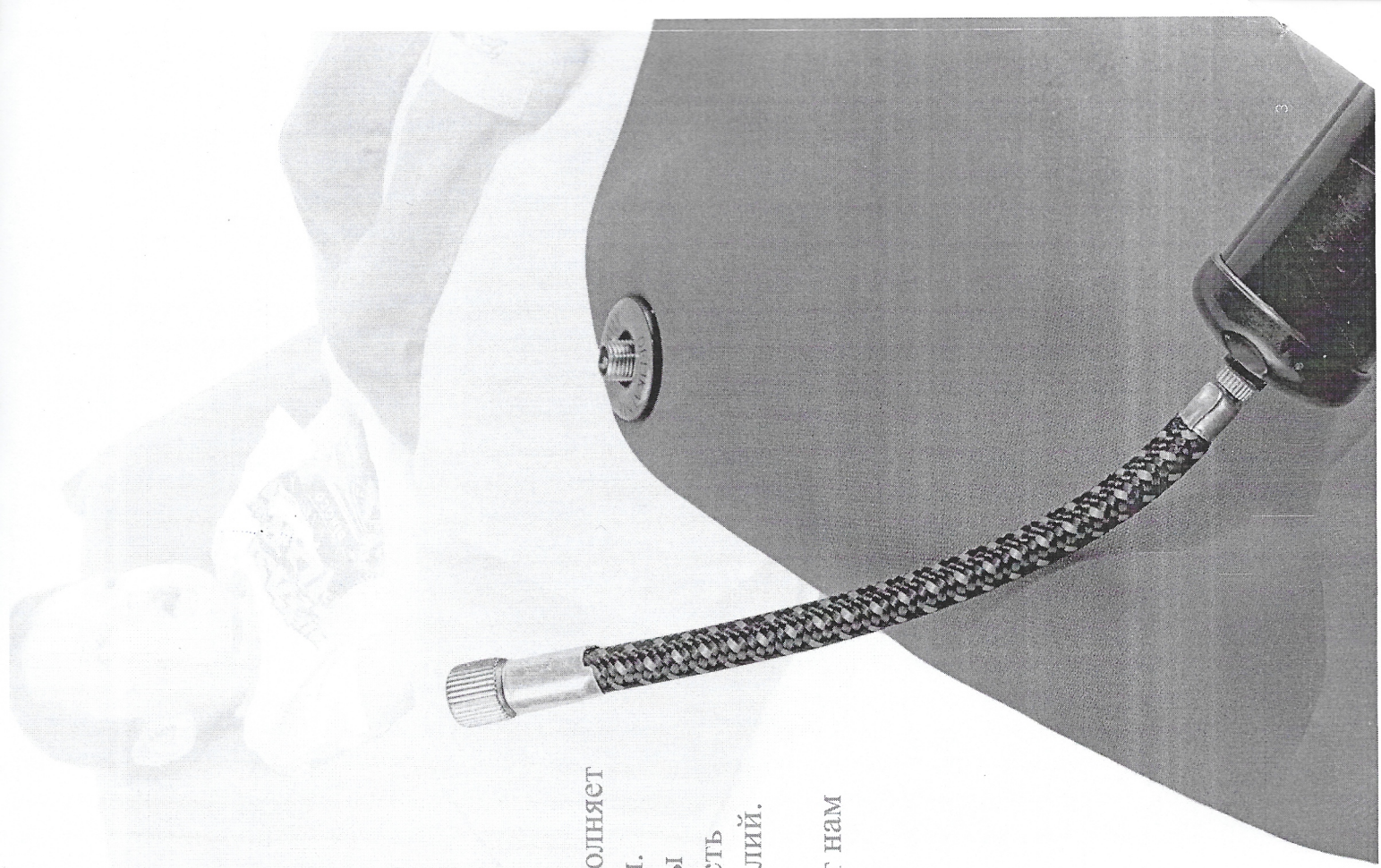

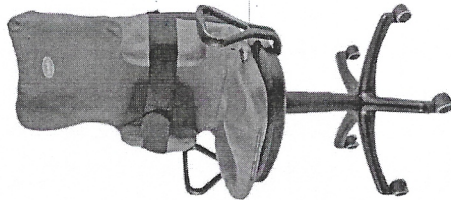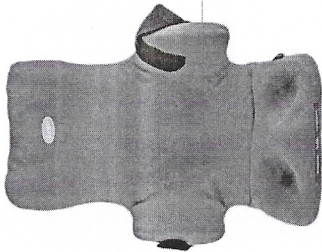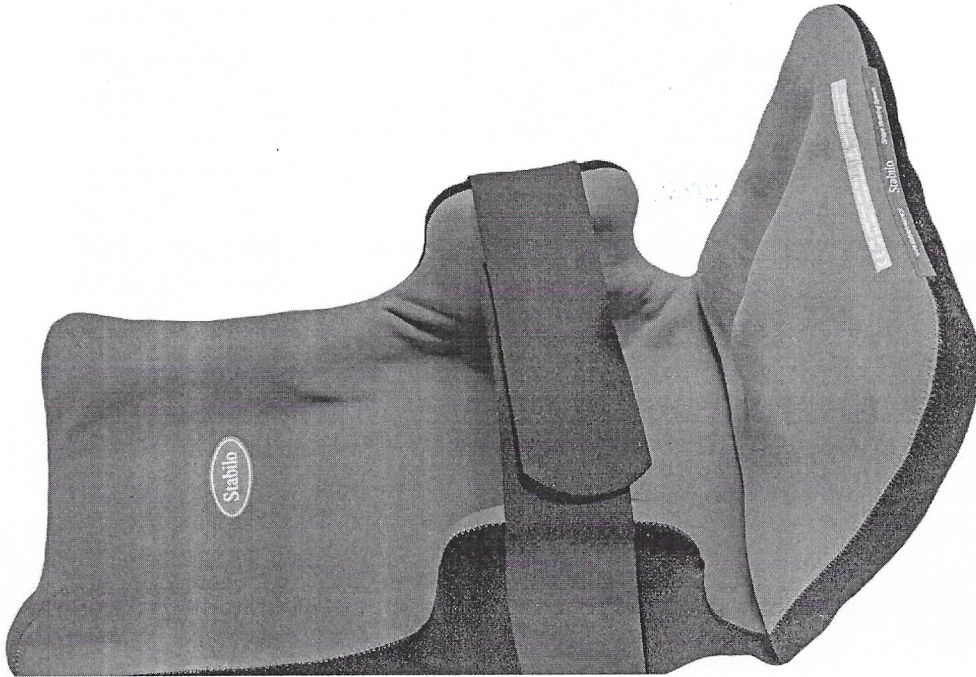

COMFORTABLE Plus DUO

СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ СИДЕНЬЕ

STABLABIO COMFORTABLE PLUS DUO - стабилизирующее сиденье. Оно объединяет в себе функцию сиденья BASE и спинки-корсета COMFORTABLE PLUS.

ПОКАЗАНИЯ

1. Для людей, которые страдают спазмами мышц - это обеспечивает стабильность и безопасность на уровне высокого мышечного напряжения.
2. Для людей с пониженным тонусом мышц - позволяет придавать телу правильную позицию.
3. Для пациентов со сколиозом - это предотвращает или ингибирует дальнейшее искажение позвоночника.
4. Для лиц с ограниченными возможностями или отсутствием контроля над головой - поддержка осуществляется при помощи создания поддерживающего подголовника.


КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. Комбинация сиденья и спинки создает необходимую поддержку. Такое решение очень хорошо стабилизирует таз и голову.
2. Обширный подголовник помогает поддерживать правильное положение головы.
3. Боковые подушки осуществляют поддержку пациентам со сколиозом.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. В качестве дополнения к сиденью кресла-коляски.
2. В качестве дополнения к другим сиденьям (например, стул, кресло).
3. Как самостоятельное сиденье для использования внутри и снаружи помещения.
4. Обширный подголовник позволяет удерживать правильное положение головы.
5. В качестве матраса для принятия положения лежа или полуполулежа.
6. Сиденье для ванной.
7. Для дополнительной стабильности в средствах передвижения.

РАЗМЕРЫ

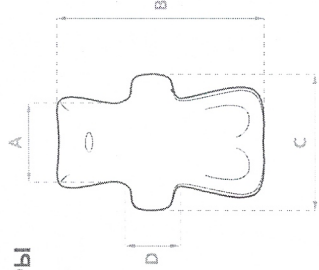

	C		D
	30	80	58
M	35	95	65
	40	115	75
X	45	120	85

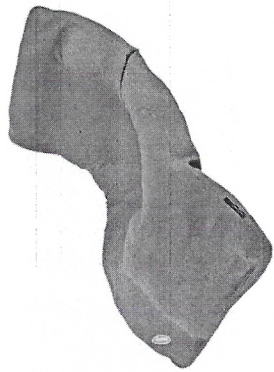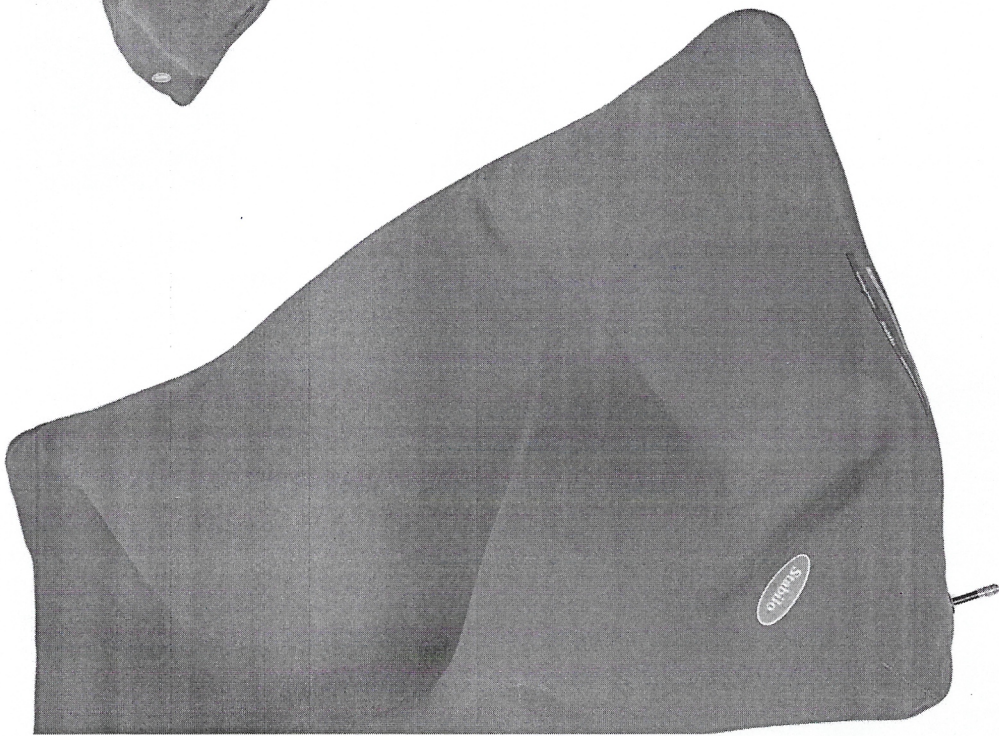

COMFORTABLE PIUS DUO

МАТРАС ДЛЯ ЛЕЖАНИЯ, ПОЛУЛЕЖАНИЯ, СИДЕНИЯ

ПОКАЗАНИЯ

1. Для людей с большими искажениями, притягивающих или затрудняющих принятие положения лежа.
2. Для лежащих людей с большими деформациями, для профилактики пролежней.
3. Для людей с большими деформациями, для стабильной поддержки и стабилизация тела во время положения лежа и сиди.


КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. Создает нишу (вы можете "укутать" пациента).
2. Размер, большое количество гранул и большая площадь поверхности создают глубокое и точное сцепление матраса.
3. Стабилизирует во время выполнения упражнений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


1. Как самостоятельное сиденье.
2. В качестве дополнения к другим сиденьям.
3. Матрас для лежания.
4. Для сохранения результатов реабилитации.
5. При правильном создании формы может быть использовано при выполнении упражнений реабилитации.

РАЗМЕРЫ

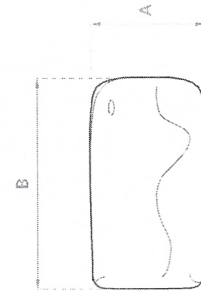

[cm]	70	160
M	90	200
M+	130	200



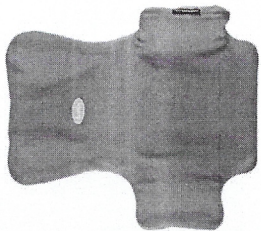

COMFORTABLE PLUS

КОРСЕТ-СПИНКА

ПОКАЗАНИЯ

1. Для людей, нуждающихся в повышенной стабильности ствола позвоночника.
2. Для людей, переносящих жесткие корсеты.


КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. Поддерживает ствол позвоночника с разных сторон.
2. Использование боковых пилотов, которые поддерживают пациентов со сколиозом.
3. При помощи подголовника поддерживает правильное положение головы.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. В качестве дополнения к креслу-коляске или другим сиденьям.
2. В качестве мягкого, моделируемого корсета.
3. Стабилизирует во время принятия душа.

РАЗМЕРЫ

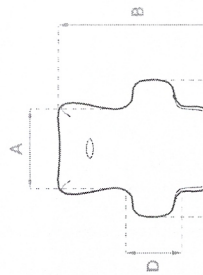

	[cm]			
	A	B	C	D
M	30	50	58	28
	35	60	65	28
X	40	75	75	35
	45	75	85	35

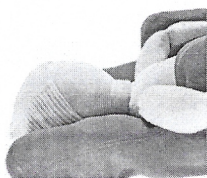

BASE

СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ СИДЕНИЕ

ПОКАЗАНИЯ

1. Для людей с различными деформациями таза.
2. Для людей с асимметрией бедер.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. Поддерживает и стабилизирует бедра, что улучшает положение всего тела.
2. Снимает нагрузку с наиболее чувствительных частей тела.
3. При помощи подголовника поддерживает правильное положение головы.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Позволяет моделировать абдуктор и создает канал для бедер.
2. Позволяет регулировать положение любого бедра.
3. Позволяет регулировать угол сгиба бедер.
4. Стабилизирует таз в любой инвалидной коляске или обычном стуле, кресле.

РАЗМЕРЫ



	[cm]	
	A	B
+	25	98
M	35	35
M+	40	40
	45	45
	50	50

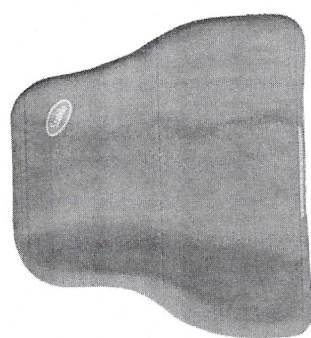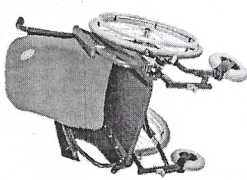

CONFORTABLE

СТАБИЛИЗАТОР СПИНЫ

ПОКАЗАНИЯ

1. Для людей с асимметрией посадки.
2. Для людей с пониженной силой мышц спины.


КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. Обеспечивает поддержку всей спины.
2. Улучшает контроль сидячего положения.
3. Обеспечивает комфорт спины.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Используется совместно со спинкой кресла-коляски.
2. Поддерживает пациента в кресле-коляске спортивного типа.

[cm]	
52	40
56	50
70	50

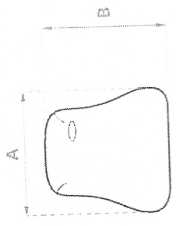

РАЗМЕРЫ



ELITE

КОМФОРТНОЕ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ СИДЕНИЕ

Модульная и многослойная комбинация Stablo и прокладки из микроволокна с чехлом.

ПОКАЗАНИЯ

1. Для людей с различными деформациями таза.
2. Для людей с асимметрией бедер.


КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. Благодаря уникальному дизайну сиденье обеспечивает наивысший комфорт при сидении.
2. Обеспечивает гигиенические условия и вентиляцию кожи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. ELITE имеет сходное применение с BASE, но рассчитана на людей, требующих большего комфорта.

[cm]	
M	40
M+	45
	50

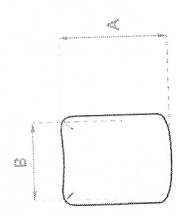

РАЗМЕРЫ



VELCROARMREST

ПОКАЗАНИЯ

1. Для людей со спазмами рук и запястий.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. Подстраивается под анатомическую форму руки.
2. Разделяет и усиливает пальцы и запястья.
3. Надежная поддержка рук оказывает прямое влияние на правильную форму позвоночника.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Правильная позиция и стабилизация предплечья в случае паралича.

РАЗМЕРЫ



VELCROARMREST

ПОКАЗАНИЯ

1. Стабилизация для людей с пониженной способностью контроля положения головы.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. Адаптируется к форме головы.
2. Обеспечивает поддержку для головы в наиболее удобной точке.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Универсальная поддержка для головы для большинства колясок.

РАЗМЕРЫ



mount 32 or 42
passovane 32 lub 42

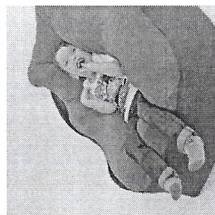

BEANSEAT

МОДЕЛИРУЕМЫЙ ПУФ

ПОКАЗАНИЯ

1. Для людей, страдающих мышечными спазмами - пух обеспечивает стабильность и уверенность при высокой напряженности мышц.
2. Для людей с мышечной слабостью - пух обеспечивает правильное положение тела.
3. Для пациентов со сколиозом - пух препятствует или сдерживает случай деформации позвоночника.
4. Для людей с пониженной способностью контроля положения головы - пух обеспечивает поддержку головы.


КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. Наполнитель, благодаря своему размеру и форме, адаптируется под форму тела пациента или позволяет поддерживать заданное положение тела.
2. Большой размер поверхности означает, что даже при высоком параметре жесткости, пациент чувствует себя комфортно.




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Стабилизирующие сиденье.
2. Позволяет добиться нужной позиции без уменьшения уровня комфорта.
3. Позволяет создать углубление.
4. Для реабилитационных упражнений.
5. Для отдыха.

РАЗМЕРЫ

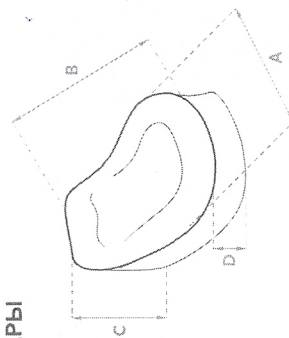

	C	D
[cm]	40 60 80	40 50 70 100
M	40 50 80	30 40 50 70

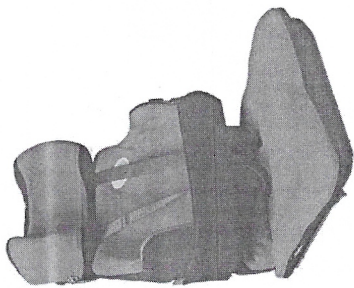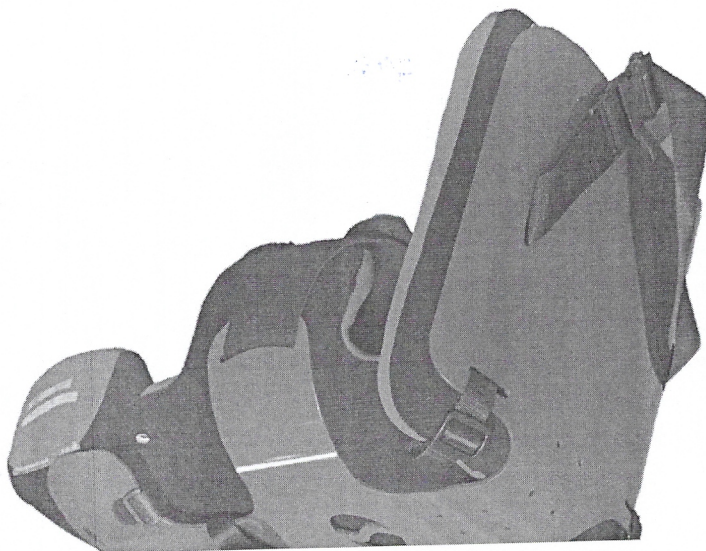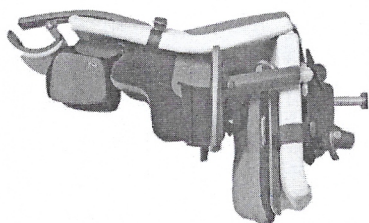

STABILO SHELL

РАМА ДЛЯ ПОДУШЕК STABILO

ПОКАЗАНИЯ

1. Алюминиевая рама для подушек Stabilo.


КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1. Металлическая конструкция обеспечивает стабильность подушек Stabilo.
2. Специальные отверстия допускают крепление дополнительных ремешков.
3. Рама позволяет крепление промежуточные и подлокотников.
4. Мягкие пластины позволяют предавать нужную форму раме.


1. The frame Stabilo Shell allows to securely attach Stabilo cushion in a chair, armchair, in a car.
2. Shell works perfectly outdoors.



wmia R

mEaSUREMENTS

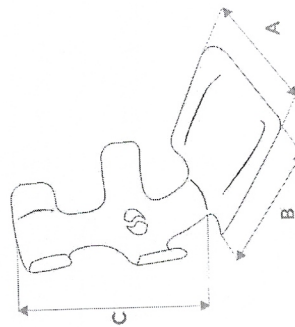

[cm]	C
M	35 40 60
	40 45 75

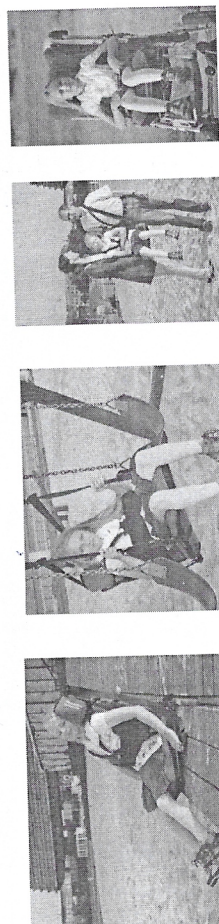

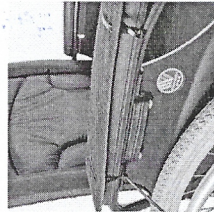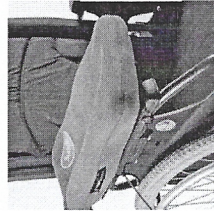

КРЕПЛЕНИЕ

В большинстве случаев дополнительное крепление не требуется.

Особенности

1. Лучшее крепление в наиболее удобных местах.
2. Лучшее крепление закрывает неопрен.
3. Крепления для поддержки головы.
4. Крепления для подлокотников.
5. Сиденья крепятся на ремни.

МОЙКА


Линейка Stabilo покрыта растягивающимся материалом, сделанном из 100% нейлона, который не вызывает аллергической реакции. Чехлы подобраны с особым вниманием к обеспечению гигиены, мойки и дезинфекции.

Плотное покрытие позволяет мыть чехлы в проточной воде в душе или ванной.

Рекомендуется использовать пену моющих средств для мытья посуды. После полоскания, протрите чехлы, так как это поможет им высохнуть быстрее.

Не сушите в стиральной машинке или сушилке.

Вы можете использовать хлор и спирт для дезинфекции.

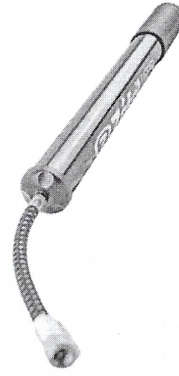

НАСОС

Каждая подушка оснащена специализированным насосом. Ручной насос поставляется с маленькими подушками, а матрасы оснащены электрическим насосом.

Stabilo
Support Your Life

