



**АРМЕД®**

NON PROGREDI, EST REGREDI

# ПАСПОРТ

## И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*Перед эксплуатацией подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!*

FS914H



FS965LH



FS966LH



FS968L



FS969H



*Средства реабилитации инвалидов:  
ходунки «Armed»:*

[www.armed.ru](http://www.armed.ru)

## ОПИСАНИЕ

**Средства реабилитации для инвалидов: ходунки «Armed»: FS914H, FS965LH, FS966LH, FS968L, FS969H** (далее по Руководству - ходунки) - приспособление для передвижения людей с нарушением опорно-двигательной системы и пожилых людей в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием, улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности.

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользователя или повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

## ПОКАЗАНИЯ

- Болезни системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы;
- Умеренные и выраженные явления гемипареза;
- Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей;
- Заболевания опорно-двигательного аппарата.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Психические расстройства;
- Потеря функциональности обеих рук;
- Нарушения статики и координации движения;
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата;
- Ограниченная или недостаточная способность к ориентации;
- Наркотическое или алкогольное воздействие.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору с ходунками;
- Не переносите весь вес тела на одну сторону рамы — ходунки могут опрокинуться;
- Не ходите по мокрому или скользкому полу;
- Не используйте ходунки, если не уверены в их исправности;
- Ходунки нельзя тянуть на себя, поднимаясь с кресла или кровати;
- Нельзя использовать ходунки при головокружении;
- Нельзя подходить слишком близко или в упор к ходункам;
- Старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела – держать осанку;
- При ходьбе необходимо смотреть вперед, а не под ноги.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	FS914H	FS965LH	FS966LH	FS968L	FS969H
Габариты (ДхШхВ) (± 5%), мм	765x585x800-920	670x590x790-890	600x590x800-900	600x580x780-880	600x650x830-955
Ширина между поручнями (± 5%), мм	430	450	450	450	450
Высота до сиденья (± 5%), мм	630	550	540	530	-
Диаметр колес (передние / задние), (± 5%), мм	200/200	200/200	150/150	125/125	200/200
Площадь сиденья (± 5%), мм	380x160	325x355	325x355	325x355	-

Параметр	FS914H	FS965LH	FS966LH	FS968L	FS969H
Количество уровней регулировки высоты	6	6	6	6	6
Шаг регулировки высоты	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Грузоподъемность (± 5%), кг	110	110	110	110	110
Масса (нетто/брутто) (± 5%), кг	9,5/10,9	9/10	7/8,5	7/8,4	7,7/9,2
Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ) (± 5%), мм	600x250x720	620x240x840	620x240x840	600x230x840	640x270x720
Количество штук в упаковке	1	1	1	1	1

## ОПИСАНИЕ

Ходунки изготовлены из металла, имеют высококачественное эмалевое лакокрасочное покрытие, складываются и раскладываются без инструмента.

Ходунки оснащены мягким сиденьем из искусственной кожи (кроме модели FS969H, для модели FS914H - пластиковое сиденье), полукруглым мягким упором для спины (кроме модели FS969H и FS914H) и корзиной для личных вещей.

Рукоятки регулируются по высоте, обеспечивают прочность их захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате, оснащены ручными тормозами (кроме модели FS968L), обеспечивающими подтормаживание при движении и фиксацию при использовании для отдыха сидя.

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Раздвиньте раму, поместите багажную корзину под сиденье и установите полукруглый мягкий упор для спины (для соответствующих моделей), установите ручки в раму.
2. Проверьте ходовые качества ходунков и тормоз, отрегулируйте высоту ручек.

## ОЧИСТКА

Производите дезинфекцию ходунков в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. Наружные поверхности ходунков обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Ходунки в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Ходунки транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение ходунков без упаковки завода-изготовителя не гарантирует их сохранность. Повреждения, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

Ходунки не содержат вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при

утилизации.

Утилизация ходунков осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ходунки \_\_\_\_\_ 1 шт.

Руководство \_\_\_\_\_ 1 экз

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции ходунков, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

### СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

**Средства реабилитации для инвалидов: ходунки «Armed»: FS914H, FS965LH, FS966LH, FS968L, FS969H** соответствуют техническим условиям и признаны годными для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/06754 действительно от 28.04.2011 г.

**Изготовитель:** Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, LTD

5 Xingfu Rd, zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, China

"Фошан Донгфанг Медикал Эквипмент Мануфактори (Лтд)",

5 Ксингфу Рд, зона А, Шишан Индустриал Парк, Нанхай Дистрикт, Фошан Сити, Китай

**Дистрибьютор:** ООО «Медконтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н, тел.: (812) 702-73-02

**Срок службы - не менее 3 лет.**

Гарантийный срок на средства реабилитации для инвалидов: ходунки «Armed»: FS914H, FS965LH, FS966LH, FS968L, FS969H – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.

На быстроизнашивающиеся части гарантия не распространяется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

**Сервисный центр:** ООО «Медконтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н

**Телефоны сервисных центров:**

Моск. обл. г. Балашиха: (495) 989-12-89

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61