




ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

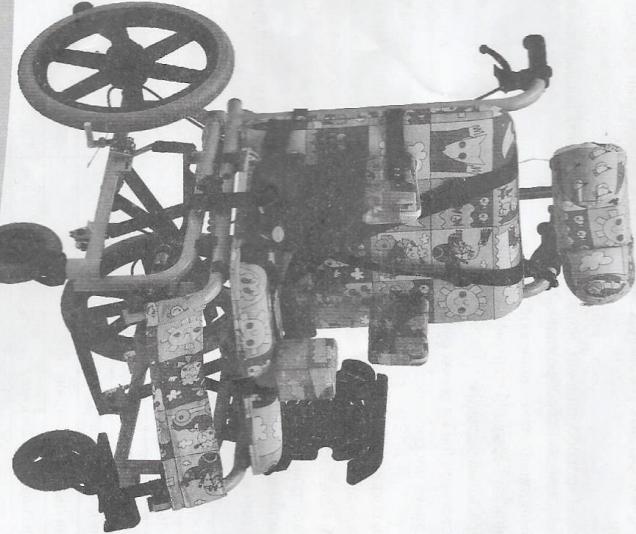

Кресло-коляска
для инвалидов «Armed»:
FS985LBJ

www.armed.ru

До начала эксплуатации подробно ознакомьтесь с наставлением Руководством!

ВВЕДЕНИЕ

Кресто-коляска для инвалидов «Армед»: FS85LBJ (далее по Руководству – кресто-коляска) предназначена для передвижения детей-инвалидов и детей с легким церебральным параличом в условиях сопровождения и на площадках с твердым покрытием. Передвижение осуществляется при помощи сопровождающего лица. Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользователя или повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

- Болезни системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения, мочеполовой системы, эпокарческих новообразований;
- Паралич или ампутация нижних конечностей;
- Повреждения или деформация конечностей;
- Детский церебральный паралич;
- Повреждения суставов (не на обеих руках) или контрактуры;
- Другие заболевания опорно-двигательного аппарата;
- Невозможность сохранения сидячего положения;
- Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата;
- потеря функциональности обеих рук;
- ограниченная или недостаточная способность к ориентации;
- наркотическое или алкогольное воздействие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Величина
Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ) ($\pm 5\%$), мм	1020x560x1000
Габариты в скложенном состоянии (ДхШхВ) ($\pm 5\%$), мм	840x260x950
Ширина сиденья ($\pm 5\%$), мм	350
Глубина сиденья ($\pm 5\%$), мм	350
Высота сиденья ($\pm 5\%$), мм	490
Угол наклона спинки/спинки с сиденьем ($\pm 5\%$), °	0-90/0-45
Диаметр колес (передние/задние) ($\pm 5\%$), мм	150/1380
Масса ($\pm 5\%$), кг	19,3
Грузоподъемность, кг	75


- Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей кресто-коляски;
- Для преодоления препятствий обязательно используйте выездные пандусы и платформы;
- Имейте в виду, что при изменении положения центра тяжести за счет смещения тела или изменения напутзии на кресто-коляску, а также наклона на угол более 10 градусов, повышается опасность опрокидывания;

ПОКАЗАНИЯ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Проверить ходовые качества кресто-коляски;
- Предупредить пользователя о планируемых действиях, особенно при наклоне кресто-коляски;
- Не разгонять кресто-коляску слишком быстро, не изменять резко направление движения;
- Не оставлять пользователя в кресто-коляске без присмотра, даже, если кресто-коляска стоит на тормозе;
- Следить, чтобы колени и локти пользователя не задевали дверных проёлов и косыков;
- Не при каких обстоятельствах не отпускать кресто-коляску при движении в гору или с неё;
- Ни в коем случае не наклонять кресто-коляску вперед;
- Чтобы съехать с бордюра, развернуть кресто-коляску задними колёсами вперёд, спустить её сначала на задних колёсах, затем опустить передние при отсутствии пандуса;
- При преодолении бордюра наклонить кресто-коляску к себе, поставить на бордюр передние колёса, затем поднять задние при отсутствии пандуса;
- Проводить регулярные осмотры кресто-коляски;
- При движении по дорогам соблюдайте правила дорожного движения.

ОПИСАНИЕ

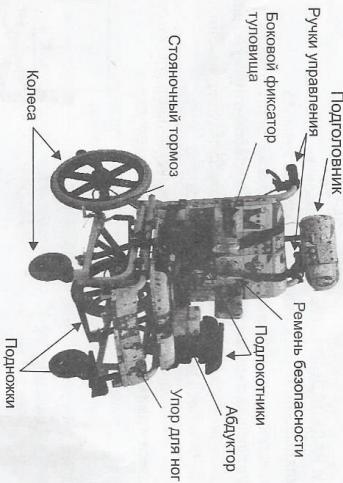

ПОДНОЖКИ

Кресто-коляска оснащена съёмными, поворотными подножками, регулируемыми по высоте с мягким упором для голени.

ПОДЛОКОТНИКИ

Кресто-коляска оснащена съёмными, регулируемыми по высоте подлокотниками. Для снятия

подлокотника необходимо открутить фиксаторы, расположенные с наружной стороны подлокотника, и вынуть его из пазов.

ТОРМОЗА

Кресто-колосяска снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа. Перемещением рычага можно осуществлять торможение кресто-колосяски до полного блокирования колес. Стояночный тормоз нельзя использовать при движении, необходимо использовать его только для стоянки.

КОЛЕСА

Кресто-колосяска оснащена колесами, имеющими задние пневматические и передние цельнолитые шины.

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОВЕРЯЙТЕ ДАВЛЕНИЕ В КАМЕРЫ ШИН. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЕЗДЫ НА СПУЩЕННЫХ ШИНАХ.

Кресто-колосяска оснащена пятиточечным ремнем безопасности, который регулируется по длине и имеет надежную застежку.

РАМА

Рама выполнена из металла и имеет защитное покрытие.

СИДЕНЬЕ И СПИНКА

Стинка и сиденье кресто-колосяски – съемные, выполнены из мягкого, прочного, влагонепроницаемого материала.

Стинка оснащена мягким, регулируемым по высоте подголовником, боковыми фиксаторами туловища, а также системой регулировки угла наклона.

Для изменения угла наклона спинки и спинки накиньте на боковой рычаг на левой ручке управления, и установите требуемый угол наклона.

Для наклона спинки используйте правый боковой рычаг.

Боковые фиксаторы туловища крепятся с помощью барашков.

Сиденье оснащено мягким аддуктором, который крепится к сиденью с помощью барашков.

СКЛАДЫВАНИЕ И РАСКЛАДЫВАНИЕ

Кресто-колосяска складывается и раскладывается без инструмента.

Извлеките кресто-колосяк из упаковки. Кресто-колосяска поставляется в сложенном виде. Надавите на направляющие сиденья, чтобы разложить кресто-колосяк по ширине. Для установки подножек необходимо надеть их на направляющие, находящиеся на раме, и повернуть их в сторону от колеса до срабатывания фиксатора. Для снятия подножек необходимо нажать на рычажок по направлению к центру, повернуть подножку в сторону колеса и движением вверх снять ее с направляющих.



Рис. 2

Установите сиденье и спинку на раму, и заблокируйте их также с помощью кнопочных штыревых фиксаторов, совместив с отверстиями рамы, расположенных с обратной стороны спинки и сиденья.

Установите в отверстия рамы рядом с ручками управления съемный кронштейн, надавите на него до щельчка фиксатора.
Установите подготовленную на требуемую высоту, законтрите его барашком.

При необходимости установите со стороны задних колес антипрокидывающее устройство, а также аддуктор и боковые фиксаторы туловища. Задержите их положение барашками. Дополнительно можно установить стопик, опоры которого должны ставиться в отверстия рамы с внешней стороны подлокотника и фиксироваться барашками.
Складывание кресто-колосяка производится в обратном порядке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОСАДКА И ВЫСАДКА

Посадка и высадка спереди

1. Поставьте кресто-колосяк на стояночный тормоз;
2. Сложите вверх подножки;
3. Приподнимите сопровождающего лица переместите пользовавшегося;
4. Отпустите подножки и поставьте на них ноги;
5. Присядьте и решите безопасность.

Посадка и высадка с боковой стороны

1. Поставьте кресто-колосяк на стояночный тормоз;
2. Снимите подлокотник с стороны, с которой будет пересаживаться пользовавшегося;
3. Сложите подножки вверх;
4. При помощи сопровождающего лица переместите пользовавшегося;
5. Разместите подлокотники и подножки в исходное положение;
6. Присядьте решив безопасность.

ПРИВЕДЕНИЕ В ДВИЖЕНИЕ И ТОРМОЖЕНИЕ

Сопровождающее лицо может приводить кресто-колосяк в движение и управлять ему с помощью предусмотренных для этого ручек управления. Сопровождающее лицо должно быть физически и психически в состоянии оценивать управление кресто-колосяки собственными силами. Для парковки используется стояночный тормоз.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Производите дезинфекцию кресто-колосяки в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. Наружные поверхности кресто-колосяки обрабатывают способом протирания дезинффицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинффицирующих средств, утвержденным в установленном порядке.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Кресто-колосяка в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться промесей, вызывающих коррозию. Кресто-колосяку транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждого вида транспорта.

Транспортировка и хранение кресто-колосяки без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность кресто-колосяки. Повреждения кресто-колосяки, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

Кресто-колосяка не содержит ядовитых веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при

утилизации.

Утилизация креста-копья осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации

- | КОМПЛЕКТАЦИЯ | 1 шт. |
|--------------------------------|--------|
| 1. Кресто-копьё | 1 экз. |
| 2. Руководство по эксплуатации | |

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции креста-копья, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Кресто-копьё для инвалидов «Армед»: FS985LBJ соответствует техническим условиям и предназначена годной для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03690 от 12.11.2009 г.

Изготовитель: «Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactury, (Ltd.)»,
5 Xingfu RD, Zone A, Shishan Industrial Park, Nantai District, Foshan City, P.R. China

«Фошань-Донгфэн Медикал Эквипмент-Мануфактори (Лтд)»,
5 Конигфу РД, зона А, Шишан Индустринл Парк, Нанхай Дистрикт, Фошань Сити, П.Р. Китай

Дистрибутор: ООО «Медиконтракт»
195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блохера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н, тел.: (812)

702-73-02

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.

На быстроизнашающиеся части и расходные материалы гарантия не распространяется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сервисный центр: ООО «Медиконтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блохера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н

Телефоны сервисных центров:

Моск. обл. г. Балашиха: (495) 989-12-89

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61