



ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Кресло-коляска для инвалидов «Armed»: FS958LBHP

www.armed.ru

До начала эксплуатации подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!

ВВЕДЕНИЕ

Кресло-коляска для инвалидов «Armed»: FS958LBHP (далее по Руководству - кресло-коляска) предназначена для передвижения детей-инвалидов и детей с детским церебральным параличом в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием. Передвижение осуществляется при помощи сопровождающего лица.

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользователя или повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

ПОКАЗАНИЯ

- Болезни системы кровообращения, нервной системы, органов пищеварения, мочеполовой системы, злокачественных новообразований;
- паралич или ампутация нижних конечностей;
- повреждения или деформация конечностей;
- детский церебральный паралич;
- повреждения суставов (не на обеих руках) или контрактуры;
- другие заболевания опорно-двигательного аппарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- невозможность сохранения сидячего положения;
- тяжелые нарушения вестибулярного аппарата;
- потеря функциональности обеих рук;
- психические расстройства;
- ограниченная или недостаточная способность к ориентации;
- наркотическое или алкогольное воздействие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Величина
Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ) (± 5%), мм	1100x570x1010-1150
Габариты в сложенном состоянии (ДхШхВ) (± 5%), мм	720x320x920
Габариты сиденья (ШхГ) (± 5%), мм	360x360
Высота сиденья (± 5%), мм	440
Ширина между поручнями (± 5%), мм	420
Высота спинки (± 5%), мм	420
Угол наклона спинки/спинки и сиденья (± 5%), гр	20-90/0-35
Диаметр колес (передний/задние) (± 5%), мм	150/380
Масса (нетто/брутто) (± 5%), кг	24,5/27
Грузоподъемность, кг	75
Габариты транспортной упаковки (ДхШхВ) (± 5%), мм	770x400x940

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием необходимо проконтролировать надежность крепления всех деталей кресла-коляски;
- Для преодоления препятствий обязательно используйте выездные пандусы и платформы;
- Имейте в виду, что при изменении положения центра тяжести за счет смещения тела или изменения нагрузки на кресло-коляску, а также наклоне на угол более 10 градусов, повышается

опасность опрокидывания;

- При посадке и высадке с кресла-коляски колеса необходимо поставить на стояночный тормоз;
- При посадке и высадке не наступайте на подножки;
- При движении без торможения в направлении препятствия (бордюр, ступенька и т.д.) имеется опасность выпадения из кресла-коляски вперед;
- Не превышайте грузоподъемность кресла-коляски;
- Не тянитесь за чем-либо через спинку кресла-коляски – велик риск опрокинуть кресло-коляску
- **Сопровождающее лицо должно:**
 - проверить ходовые качества кресла-коляски;
 - проверить, чтобы стопы пользователя устойчиво располагались на подножках;
 - предупреждать пользователя о планируемых действиях, особенно при наклоне кресла-коляски;
 - не разгонять кресло-коляску слишком быстро, не изменять резко направление движения;
 - не оставлять пользователя в кресле-коляске без присмотра, даже, если кресло-коляска стоит на тормозе;
 - следить, чтобы колени и локти пользователя а не задевали дверных проёмов и косяков;
 - ни при каких обстоятельствах не отпускать кресло-коляску при движении в гору или с ней;
 - ни в коем случае не наклонять кресло-коляску вперед;
 - чтобы съехать с бордюра, развернуть кресло-коляску задними колёсами вперед, спустить ее сначала на задних колёсах, затем опустить передние при отсутствии пандуса;
 - при преодолении бордюра наклонить кресло-коляску к себе, поставить на бордюр передние колёса, затем подтянуть задние при отсутствии пандуса;
 - проводить регулярные осмотры кресла-коляски;
 - при движении по дорогам соблюдайте правила дорожного движения.

ОПИСАНИЕ



Рис. 1

ПОДНОЖКИ

Кресло-коляска оснащена поворотными, регулируемым по высоте подножками с мягкими упорами для ног.

ПОДЛОКОТНИКИ

Кресло-коляска оснащена съемными, регулируемыми по высоте подлокотниками. Подлокотники имеют мягкие накладки на поручнях. Для снятия подлокотника необходимо открутить фиксаторы, расположенные с наружной стороны подлокотника, и вынуть его из пазов.

ТОРМОЗА

Кресло-коляска снабжена рычагами стояночного тормоза слева и справа. Перемещением рычага можно осуществлять торможение кресла-коляски до полного блокирования колес. Стояночный тормоз нельзя использовать при движении, необходимо использовать его только для стоянки.

Дополнительно кресло-коляска оснащена рычагами ручного тормоза, расположенными под ручками управления.

КОЛЕСА

Кресло-коляска оснащена колесами, имеющими задние и передние цельнолитые шины.

РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ

Кресло-коляска оснащена пятиточечным ремнем безопасности, который регулируется по длине и имеет надежную застёжку.

РАМА

Рама кресла-коляски изготовлена из коррозионностойкого алюминиевого сплава и имеет эмалевое лакокрасочное покрытие.

ПОДГОЛОВНИК

Кресло-коляска оснащена съемным, регулируемым по высоте мягким подголовником.

СИДЕНЬЕ И СПИНКА

Спинка и сиденье кресла-коляски - съемные, выполнены из мягкого, прочного, влагопроницаемого материала. Крепятся к раме при помощи U-образных фиксаторов.

Спинка оснащена мягким, регулируемым по высоте подголовником, боковыми фиксаторами туловища, а также системой регулировки угла наклона до положения «лежа». Для изменения угла наклона нажмите на боковой рычаг на правой ручке управления, и установите требуемый угол наклона.

Боковые фиксаторы туловища крепятся с помощью барашков.

Сиденье оснащено мягким абдуктором, который крепится к сиденью с помощью барашков.

Сиденье регулируется по углу наклона. Для изменения угла наклона сиденья нажмите на боковой рычаг на левой ручке управления и установите требуемый угол наклона.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

СКЛАДЫВАНИЕ И РАСКЛАДЫВАНИЕ

Кресло-коляска складывается и раскладывается без инструмента.

Извлеките кресло-коляску из упаковки. Кресло-коляска поставляется в сложенном виде. Надавите на направляющие сиденья, чтобы разложить кресло-коляску по ширине.



Рис. 2

Откройте и разверните подножки.

Установите сиденье и спинку, закройте их с помощью штыревых фиксаторов, расположенных с обратной стороны.

www.armed.ru Торговая марка «АРМЕД» (495) 989-12-88, (812) 702-73-02, (343) 286-42-73

Установите в отливки рамы рядом с ручками управления съемный кронштейн подголовника надавите на него до щелчка фиксатора.

Установите на раму мягкое сиденье и спинку и заблокируйте их штыревыми фиксаторами соответствующие отверстия рамы.

При необходимости установите и зафиксируйте на требуемой высоте барашком подголовник прикрепите абдуктор, боковые фиксаторы туловища, а также антипрокидывающее устройство.

Складывание кресла-коляски производится в обратном порядке.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОСАДКА И ВЫСАДКА

Посадка и высадка спереди

1. Поставьте кресло-коляску на стояночный тормоз;
2. Сложите вверх подножки;
3. При помощи сопровождающего лица переместите пользователя;
4. Опустите подножки и поставьте на них ноги, установите абдуктор, боковые фиксаторы туловища;
5. Пристегните ремень безопасности.

Посадка и высадка с боковой стороны

1. Поставьте кресло-коляску на стояночный тормоз;
2. Снимите подлокотник, со стороны, с которой будет пересаживаться пользователь;
3. Сложите подножки вверх;
4. При помощи сопровождающего лица переместите пользователя;
5. Разместите подлокотники и подножки в исходное положение, установите абдуктор, боковые фиксаторы туловища;
6. Пристегните ремень безопасности.

ПРИВЕДЕНИЕ В ДВИЖЕНИЕ И ТОРМОЖЕНИЕ

Сопровождающее лицо может приводить кресло-коляску в движение и управлять ею с помощью предусмотренных для этого ручек управления.

Сопровождающее лицо должно быть физически и психически в состоянии оценивать управление кресла-коляски собственными силами. Для парковки используется стояночный тормоз.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Производите дезинфекцию кресла-коляски в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. Наружные поверхности кресла-коляски обрабатывают способом протирания дезинфицирующим средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей в режимах, регламентированных действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Кресло-коляска в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Кресло-коляску транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение кресла-коляски без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность кресла-коляски. Повреждения кресла-коляски, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

www.armed.ru Торговая марка «АРМЕД» (495) 989-12-88, (812) 702-73-02, (343) 286-42-73

Кресло-коляска не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация кресла-коляски осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Кресло-коляска	1 шт.
2. Набор ключей	1 шт.
3. Абдуктор	1 шт.
4. Подушка сиденья	1 шт.
5. Подголовник	1 шт.
6. Антипрокидывающее устройство	2 шт.
7. Боковой фиксатор туловища	2 шт.
8. Спинка	1 шт.
9. Кронштейн подголовника	1 шт.
10. Руководство	1 экз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции кресла-коляски, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Кресло-коляска для инвалидов «Armed»: FS958LBHP соответствует техническим условиям и признана годной для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03690 действительно с 12.11.2009 г.

Изготовитель: "Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactory, (Ltd.)",

5 Xingfu RD, zone A, Shishan Industrial Park, Nanhai District, Foshan City, P.R. China

"Фошан Донгфанг Медикал Эквипмент Мануфактори (Лтд)",

5 Ксинфу РД, зона А, Шишан Индустриал Парк, Нанхай Дистрикт, Фошан Сити, П.Р. Китай

Дистрибьютор: ООО «МедКонтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н, тел.: (812) 702-73-02

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный срок на кресло-коляску для инвалидов «Armed»: FS958LBHP – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.

На быстроизнашивающиеся части гарантия не распространяется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сервисный центр: ООО «МедКонтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н

Телефоны сервисных центров:

Моск. обл. г. Балашиха: (495) 989-12-89

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61

www.armed.ru Торговая марка «АРМЕД» (495) 989-12-88, (812) 702-73-02, (343) 286-42-73