



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Опора для ходьбы ОХД-314.1. «Я Могу!» ХОДУНКИ-МАНЕЖ

Производитель ООО НПП «ДВМ», Россия

Изделие медицинского назначения изготовлено согласно документации производителя, полностью укомплектовано согласно действующей спецификации. Комплектующие в соответствии со стандартной комплектацией изделия - см. инструкцию на изделие.

Срок гарантийного обслуживания установлен производителем и составляет 24 месяца с даты продажи.

Артикул изделия _____ Заводской номер _____

_____ **отметка ОТК**

Дата производства : _____

Дата продажи : _____

_____ **Подпись печать официального дистрибьютера**


ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»

620035, Россия, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 8-1

Выставочный зал: г.Екатеринбург, ул. Кислородная, 8-А, строение «К»

тел/факс: (343) 383-11-95, 383-11-96 e-mail: info@dvm-reab.ru

www.dvm-reab.ru

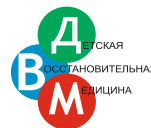

ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»

ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации, гарантийный талон

Опора для ходьбы ХОДУНКИ ОХД-314.1.

арт. 314.1.01.; арт. 314.1.02

Руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования изделия как в условиях стационара, так и в домашних условиях.

Сохраняйте данное руководство и паспорт изделия на всё время эксплуатации.

Общие сведения

Опора для ходьбы - ходунки «Я Могу!» изготовлены в соответствии с ТУ 9398-001-91079148-2011, регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11517. До начала эксплуатации изучите данное руководство. При возникновении вопросов относительно эксплуатации изделия, качества и особенностей изделия, просим обращаться к официальным представителям производителя в Вашем регионе или непосредственно в ООО НПП «ДВМ» по телефонам : (343) 383-11-95 (96). Для производства изделия использованы материалы, безопасность которых гарантируется сертификатами качества : фанера высококачественная экологически чистая, металлическая профильная труба со стойким цветным порошковым покрытием, винилискожа, поролон, фурнитура. Деревянные части опоры покрыты экологически чистой смесью натуральных масел с твердым воском, стойкой к обработке традиционными средствами.

Краткое описание и назначение

Опора для ходьбы ОХД-314.1. «Я Могу!» - техническое средство реабилитации для детей инвалидов. Представляют собой ходунки-манеж на металлической колесной раме, с мягкой обивкой для туловища, съемным регулируемым сидением-гамаком. Предназначены для обучения ходьбе, развитию навыков равновесия и отработки навыков ходьбы у детей с низким уровнем физического развития, неврологическими патологиями в том числе ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Опора для ходьбы - ходунки-манеж могут использоваться как в условиях специализированных учреждений, так и в домашних условиях.

Опора для ходьбы ОХД-314 «Я Могу!» представляет собой металлическую раму на самоориентирующихся колесах, со съемной регулируемой по высоте обивкой для туловища. Обивка для туловища оснащена мягкой отшивкой. Сидение-гамак крепится к обивке для туловища при помощи регулировочных ремней.


Исполнения опоры для ходьбы ОХД-314.1. «Я Могу!»:

арт. 314.1.01 - для детей дошкольного и младшего школьного возраста;

арт. 314.1.02 - для детей младшего и среднего школьного возраста.

Технические характеристики

Характеристика	314.1.01	314.1.02
Высота обивки для тела, мм	560 - 760	660 - 860
Шаг регулировки обивки для тела, мм	50	50
Диаметр обивки для тела	300	400
Габаритные размеры (Д x Ш), мм	770 x 720	870 x 850
Максимальная нагрузка, кг	40	55
Вес изделия, кг	Не более 6	Не более 10

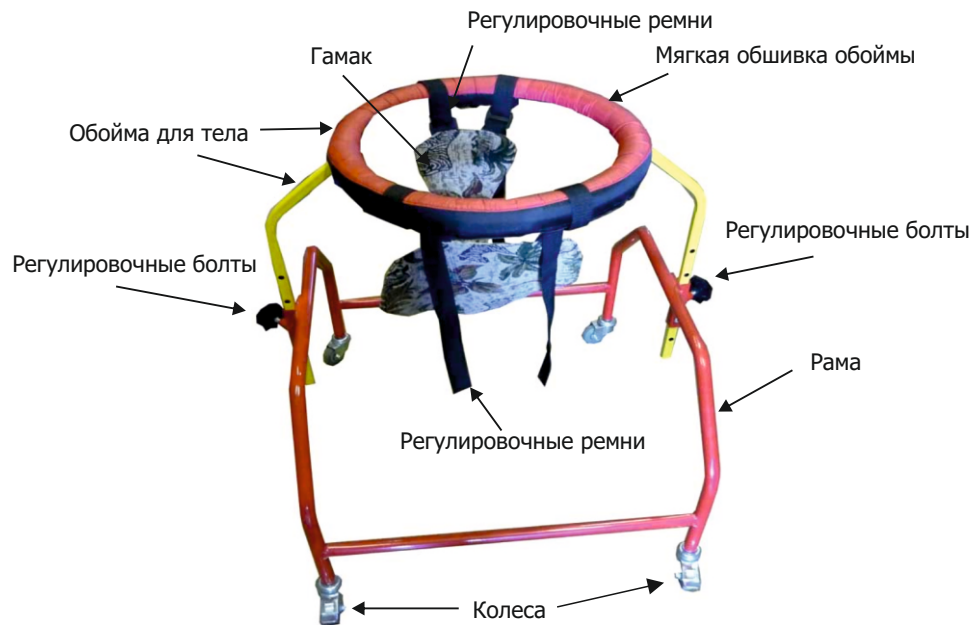

Требования к безопасности

Опора для ходьбы ОХД-314.1. «Я Могу!» предназначена для использования в помещениях, не пытайтесь использовать изделие на улице. Не допускается эксплуатация опоры в помещениях с непрочным полом и на поверхности, имеющей значительные неровности.



Перед каждым использованием проверяйте опору на наличие серьезных повреждений. При обнаружении таковых и при сомнениях в возможности использования изделия, ни в коем случае не используйте опору. В случае обнаружения неисправности, не пытайтесь исправить самостоятельно, обратитесь за консультацией к дилеру, у которого приобретали изделие или непосредственно в сервисную службу производителя по тел.: (343) 383-11-95 (96).

Ходунки-манеж сконструированы таким образом, что возможность падения ребенка исключена, однако не следует надолго оставлять ребенка-инвалида, даже если он находится в ходунках, одного в помещении. При каждом высаживании ребенка в ходунки-манеж тщательно проверяйте все крепления, в особенности крепления регулирующих ремней, на которых держится гамак. Не забывайте о быстром процессе роста ребенка - раз в две недели проверяйте высоту закрепления гамака и раз в месяц - высоту установки обоймы для тела.

Правила хранения и ухода.


До эксплуатации изделие необходимо хранить в упаковке. Перед первой эксплуатацией следует произвести проверку комплектности изделия, установить обойму для тела, закрепить её на необходимой высоте регулировочными болтами. Затем закрепить гамак в наиболее удобное для ребенка положение при помощи регулировочных ремней. Рекомендуемые условия хранения: в сухом помещении при температуре воздуха от - 5 до +30 градусов Цельсия. Срок хранения - не более 12 месяцев с даты выпуска изделия. Дата выпуска указана в гарантийном талоне. При транспортировке изделия запрещается подвергать ударным нагрузкам. Изделие нуждается в тщательном уходе. Периодически следует очищать рабочие поверхности от возможных загрязнений. Рекомендуется после каждого использования опоры протирать поверхности влажной тряпочкой. При наличии серьезных загрязнений - использовать разрешенные к применению гигиенические и моющие средства. Запрещается погружать изделие или части изделия в воду. Покрытие металлических и деревянных частей изделия является стойким, но при этом следует избегать воздействия твердыми и острыми предметами на окрашенные поверхности. Изделие обладает длительным сроком эксплуатации и надежностью, однако, если вы заметили неисправность, прекратите или не начинайте использование изделия и не пытайтесь исправить неисправность самостоятельно. Обратитесь к дилеру, у которого было приобретено изделие или в ближайший магазин, торгующий товарами для инвалидов.

Гарантийные обязательства производителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие опоры требованиям технических условий при соблюдении требований к эксплуатации, транспортировке и хранению, установленных в настоящем Руководстве.

Гарантийный срок службы установлен равным 24 месяца со дня выдачи опоры пользователю (либо приобретения пользователем). В течение гарантийного срока в случае неисправности предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет опору либо её составные части при соблюдении владельцем опоры требований к её эксплуатации, транспортировке и хранению.

Предприятие-изготовитель не несёт вышеуказанных гарантийных обязательств в случае ненадлежащей эксплуатации опоры (нарушении инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию и уходу). Предприятие-изготовитель не несёт вышеуказанных гарантийных обязательств при появлении на опоре трещин и изломов, если они вызваны недопустимыми ударными нагрузками, о чем свидетельствует наличие вмятин и трещин.

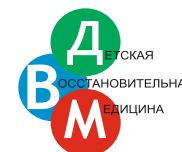

ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»

620035, Россия, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 8-1
 Выставочный зал: г.Екатеринбург, ул. Кислородная, 8-А, строение «К»
 тел/факс: (343) 383-11-95, 383-11-96 e-mail: info@dvm-reab.ru

www.dvm-reab.ru