



## Кресла-туалеты

WC Mobail; WC XXL; WC eFix;  
WC Econom; WC Delux.



Руководство по эксплуатации

[www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

## СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	4
1.3 Упаковка.....	6
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	6
2.1 Важные предупреждения.....	6
2.2 Порядок работы.....	6
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	8
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	8

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик кресел-туалетов моделей: WC Mobail; WC XXL; WC eFix; WC Econom; WC Delux.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

## 1. Описание и работа

### 1.1 Назначение

Кресла-туалеты с санитарным оснащением предназначены для ухода за людьми с частичной потерей функций опорно-двигательного аппарата. Кресла-туалеты оснащены съёмным судном.

## 1.2 Технические характеристики

### Модель WC Econom

- Кресло-туалет 2 в 1 (может применяться как кресло-туалет или поручень для унитаза)
- Разборная конструкция
- Рама изготовлена из стали
- Поручни с пластиковыми подлокотниками
- Сиденье, ведро и крышка изготовлены из гигиенического пластика
- Съёмное ведро с крышкой
- Регулируемая высота сиденья
- Регулируемые по высоте ножки с противоскользящими резиновыми наконечниками
- Шаг регулировки высоты 2,5 см
- Максимальная нагрузка: 100 кг
- Производство: Китай
- Гарантия: 6 месяцев

### Модель WC Mobail

- Кресло-туалет 3 в 1 (может применяться как кресло-туалет, насадка на унитаз или поручень для унитаза)
- Кресло-туалет оснащен 4-я колесами с 2-я тормозами
- Рама изготовлена из стали
- Поручни с пластиковыми подлокотниками
- Сиденье, ведро и крышка изготовлены из гигиенического пластика
- Съёмное ведро с крышкой
- Съёмная, гигиеническая защита от брызг ,если кресло-туалет используется как насадка на унитаз
- Регулируемая высота сиденья
- Регулируемые по высоте ножки с противоскользящими резиновыми наконечниками
- Шаг регулировки высоты 2,5 см
- Максимальная нагрузка: 100 кг

- Производство: Китай
- Гарантия: 6 месяцев

### Модель WC Delux

- Кресло-туалет с откидными вниз поручнями (может применяться как кресло-туалет или поручень для унитаза)
- Рама изготовлена из стали
- Откидные вниз поручни с мягкими подлокотниками
- Сиденье, ведро и крышка изготовлены из гигиенического пластика
- Съёмное ведро с крышкой
- Регулируемая высота сиденья
- Регулируемые по высоте ножки с противоскользящими резиновыми наконечниками
- Шаг регулировки высоты 2,5 см
- Максимальная нагрузка: 100 кг
- Производство: Китай
- Гарантия: 6 месяцев

### Модель WC XXL

- Кресло-туалет складной
- Увеличенное расстояние между поручнями
- Может применяться как кресло-туалет или поручень для унитаза
- Рама изготовлена из алюминия
- Складная конструкция рамы
- Сиденье, ведро и крышка изготовлены из гигиенического пластика
- Съёмное ведро с крышкой
- Регулируемая высота сиденья
- Регулируемые по высоте ножки с противоскользящими резиновыми наконечниками
- Поручни с пластиковыми подлокотниками
- Шаг регулировки высоты 2,5 см
- Максимальная нагрузка: 100 кг
- Производство: Китай
- Гарантия: 6 месяцев

## Модель WC eFix

- Кресло-туалет складной
- Рама изготовлена из стали
- Складная конструкция рамы
- Съёмное ведро с крышкой
- Фиксированная высота сиденья
- Поручни с пластиковыми подлокотниками
- Максимальная нагрузка: 100 кг
- Производство: Китай
- Гарантия: 6 месяцев

### 1.3 Упаковка

В комплекте: рама кресло-туалета, ободок с крышкой, ведро, руководство по эксплуатации.

## 2. Использование по назначению

### 2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Убедитесь, что все балки надежно закреплены.

### 2.2 Порядок работы.

Перед использованием проверьте части кресло-туалета на наличие дефектов и повреждений.

Сборка кресло-туалета WC Mobail.

1. Опустите ведро в отверстие и накройте крышкой.

Сборка кресло-туалета WC Delux.

1. Установите спинку на заднюю часть рамы, вставьте переднюю поперечную балку в специальные отверстия.

Убедитесь, что обе медные кнопки выскочили полностью из отверстий.


2. Наклоните раму и прикрепите держатель съёмного судна.

3. Прикрепите ножки к раме.


## Сборка кресло-туалета WC eFix, WC XXL.

Разложите кресло-туалет, опустите ведро в отверстие и накройте крышкой.


## Сборка кресла-туалета WC Эконом.

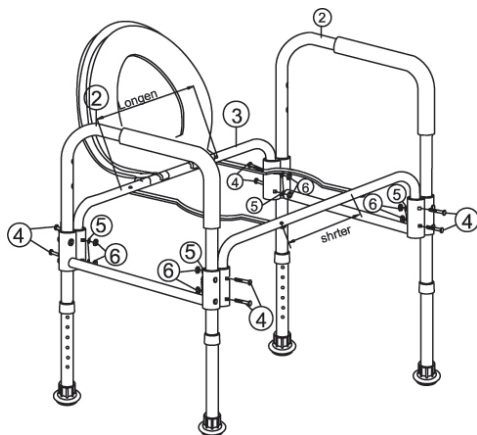

Соедините раму сиденья с подлокотниками (2 x 2)  
Закрепите шурупами (4 x 8)  
болтами (5 x 8)  
контргайками (6 x 8)

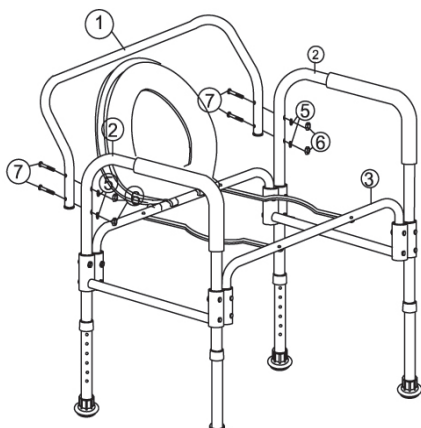

Установите (1 x 1) спинку в отверстие между подлокотниками (2 x 2)  
Закрепите шурупами (7 x 4)  
болтами (5 x 4)  
контргайками (6

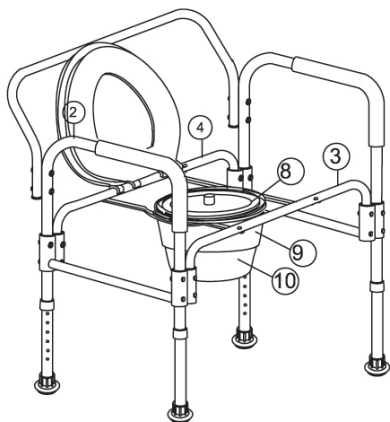

Поставьте насадку на ведро (8 x 1), ведро (9 x 1) и защиту от брызг (10 x 1) в отверстие, закрепленное на трубках

### 3. Техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

### 4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Новопоселковая, д.6

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ место печати,  
штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

---

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)



Кресла-туалеты модели WC Mobail; WC XXL; WC eFix;  
WC Econom; WC Delux.

Производитель: Foshan Dayang Medical Technology Co., Ltd.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца \_\_\_\_\_

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

\_\_\_\_\_

\* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель также не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

\* \*Более подробная информация на сайте [www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/ 10854

