



## Трости опорные

С Standart, С Delta, С Qlever, С Pyramid



Руководство по эксплуатации

## СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	4
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	4
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	5

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик тростей опорных C Standart, C Delta, C Qlever , C Pyramid.

Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

## 1. Описание и работа

### 1.1 Назначение

Предназначены для облегчения ходьбы, путем уменьшения нагрузки на нижние конечности.

Квадратная опора в моделях C Delta, C Qlever , C Pyramid служит для увеличения устойчивости и используется людьми с нарушенной координацией.

### 1.2 Технические характеристики

Характеристика	Описание	Артикул
материал	алюминий	все модели
рукоятка	резиновая с об- мягчением	C Qlever
	пластиковая	C Standart, C Delta, C Pyramid
особенность	квадратная опо- ра	C Qlever, C Pyramid
	основа на 3-х ножках	C Delta
производство	Китай	все модели
гарантия	6 месяцев	все модели

### 1.3 Упаковка

Комплектация: трость, руководство по эксплуатации

## 2. Использование по назначению

### 2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Пользователи с ограниченными возможностями или пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно не должны использовать данное изделие без сопровождающего лица.
- Максимальная нагрузка на трость C Standart- 100 кг;
- Максимальная нагрузка на трости C Delta, C Qlever, C Pyramid - 110 кг.

### 2.2 Порядок работы:

1. Трости продаются в собранном виде.
2. Отрегулируйте высоту трости с помощью кнопочного фиксатора.
3. При регулировании высоты трости убедитесь, что кнопочный фиксатор полностью выскочил из отверстия.

## 3. Техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

## 4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул.Новопоселковая, д.6

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_ место печати, штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

---

Трости опорные C Standart, C Delta, C Qlever, C Pyramid.  
Производитель: Foshan Dayang Medical Technology Co., Ltd.,  
Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125363, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6

Тел.: (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;



Серийный номер	
Дата продажи	

Подпись продавца \_\_\_\_\_

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

\_\_\_\_\_

\* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации. Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

\*\* Более подробная информация на сайте [www.sims2.ru](http://www.sims2.ru)

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/ 10856