

- Используйте простыни для продления срока службы покрытия стола. Мы предлагаем Вам использовать покрытие из 100%-ого хлопка для предотвращения образования масляных пятен на покрытии стола. Так же рекомендуется использовать такое покрытие и для подголовника и подставки для рук.
- Используйте смазку с высокой проникающей способностью (например: смазку для цепей, петель и замков; прим.: не входит в комплект поставки) для обработки соединений с целью уменьшения возможных скрипов и посторонних звуков.

Гарантия

Гарантийный срок на ножки составляет 12 месяцев со дня продажи; гарантийный срок на искусственную кожу составляет 12 месяцев со дня продажи; исключение составляют износившиеся детали, и поврежденные, причиненные вследствие последующего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции может быть произведен в компании ООО «Медтехника МОСКВА» с применением только оригинальных запчастей и деталей.

Дата продажи: « _____ » _____ 20 ____ Г.

Генеральный директор
 ООО «Медтехника МОСКВА»

В.В.Катя

Отметка о произведенный гарантийных работ:

Дата	Отметки сервисного центра	Подпись, печать покупателя	Примечание
		ФИО МП	Работу принял, претензий не имею.
		ФИО МП	Работу принял, претензий не имею.
		ФИО МП	Работу принял, претензий не имею.
		ФИО МП	Работу принял, претензий не имею.

ООО «Медтехника МОСКВА»

125222, г. Москва, ул. Гавриила Белобородова, д.35/2, помещение 10
 ОГРН 5087746166954 ИНН 77333670400 КПП 773301001,
 р/с: 4070281040000012277 в ПАО «Промсвязьбанк»
 г. Москва, к/с: 301018104000000000555 БИК 044525555
 тел: +7(495)504-26-51(52) факс: +7(495)504-26-53
<http://www.med-mos.ru> e-mail: info@med-mos.ru



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Столы массажные переносные и стационарные с принадлежностями

производства ХУАНШАН ДЖИНФУ ВУД ТРАДИНГ КО., ЛТД, КНР
 Huangshan JinFu Wood Trading Co., Ltd., 17, Qiliting, Qimen, Huangshan, Anhui, China
 Номер партии 022018060301-12/17
 032018060301-12/17

Массажные столы переносные и стационарные предназначены для различных видов массажа, косметологических и лечебных процедур.
 Принадлежности предназначены для облегчения работы массажиста и усиления эффективности массажных процедур.
 Техническая спецификация массажных столов приведена в таблице 1

Таблица 1

Артикул	Модельный ряд	Конструкция	Вес, кг	Количество секций	Ширина, см	Высота, см	Длина, см	Нагрузка, кг	Ступенчатая нагрузка, кг	Слой пены, см
JF-AV01	MCT-003L	Переносной; деревянная рама и ножки из бука	18,2	2	71	62-87	186	130	750	5
	MCT-013L									
	MCT-023L									
	MCT-123L									
	MCT-131L									
JF-AV01	MCT-103L	Переносной; алюминиевая рама и ножки	20,3	3	71	62-87	186	130	750	5
	MCT-113L									
	MCT-123L									
	MCT-311L									
	MCT-133L									
JF-AL01A	MCT-002L	Переносной; алюминиевая рама и ножки	17,2	2	71	59-80	186	130	110	5
	MCT-323L									
	MCT-321L									
JF-AL01A	MCT-102L	Переносной; алюминиевая рама и ножки	19,3	3	71	59-80	186	130	110	5
	MCT-331L									
	MCT-332L									
JF-X-MT2	MCT-31L	Стационарный; деревянные рама и ножки	33,6	1	76	67-86	186	200	1100	7
	MCT-71L									
	MCT-071L									
JF-AL01F	MCT-3210L	Переносной; алюминиевая рама и ножки	11	2	70	63	186	150	800	4

Это важно!



- Прочтите настоящую инструкцию **перед сборкой и/или первым использованием** изделия и храните ее в доступном месте.
- Придерживайтесь рекомендаций, особенно касающихся безопасности использования.
- Сохраните настоящую инструкцию на будущее (в т.ч. для последующей продажи изделия).

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Закажите услугу профессиональной сборки с проверкой механизмов изделия – этим Вы предохраните себя от возможных ошибок при сборке и сохраните гарантию на изделие.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не пользуйтесь изделием в течение 2-х часов после перевозки при минусовой температуре. Эксплуатация изделия при минусовой температуре запрещена.
- Не допускается чрезмерная нагрузка на подлокотники и подголовник. Они предназначены только для комфортного расположения головы и рук пациента. На подлокотниках нельзя сидеть, стоять, опираться, сальсывающая с массажного стола. Рекомендуем снимать подлокотники, если изделие используется в режиме массажного стола и устанавливая при складывании в массажное кресло (для столов с данной функцией).
- Не опускайте спинную секцию ложемента (для столов с регулируемой углом наклона спинной части ложемента) прикладывая усилие к подголовнику. Опирайтесь только на сам ложемент. В противном случае механизм регулировки и/или крепления подголовника может не выдержать.
- Будьте внимательны, пользуясь острыми предметами, т.к. они могут повредить покрытие стола.
- Перед первым использованием и не реже одного раза в три месяца (при интенсивной эксплуатации по мере необходимости) проверяйте и затягивайте все резьбовые соединения и рукоятки во избежание их потери.
- Перед первым использованием и не реже одного раза в три месяца регулируйте длину тросов управления газовыми упорами. В процессе эксплуатации тросы могут незначительно растягиваться, что влияет на корректную работу ступора газового упора.
- Регулярно смазывайте металлические соединения для предупреждения возникновения скрипов и прочих посторонних звуков.
- **«Перед использованием необходимо произвести осмотр изделия, на наличие видимых дефектов и неисправностей. В случае обнаружения дефектов и неисправностей немедленно прекратить эксплуатацию изделия и обратиться в ближайший сервисный центр»**

Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения настоящих условий!

Установка: начните с поднятия вверх ручек и отпирания фиксирующего устройства. Разведите панели стола в стороны, пока ножки полностью не раскроются. Если необходимо, уберите всю фурнитуру из-под эластичного ремня, используемого для хранения. Проверьте стол на наличие повреждений, просмотрите предупредительные надписи. Затем поставьте стол в вертикальное положение и приподнимите с одной стороны, нажимая при этом на середину, для того, чтобы убедиться, что стол полностью раскрылся и его поверхность – плоская. Далее

установите положение 10 «Фиксатор» (для подъема опоры для спины) на том же уровне (горизонтально), установите концы стола и массажный стол готов к эксплуатации.

Складывание: Поставьте стол на бок в слегка закрытом положении. Установите фурнитуру в эластичный ремень, предназначенный для хранения, если это необходимо. Сложите ножки внутрь, следя за тем, чтобы шурупы оставались на внутренней стороне стола, не закрутились и не перетнулись. Запузырение или перегиб шурупов может привести к их повреждению и послужить причиной травмы. Следите за тем, чтобы шурупы не закрутились и не перетнулись, когда складываете стол. Затем сложите две половины стола, зашелкните фиксатор и перенесите в нужное место, держа стол за ручки.

Чистка покрытия: Используйте мягкий мыльный раствор. Рекомендуется во время использования покрывать поверхность простыней или покрывалом.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, наименования, артикулы – без предварительного уведомления.

Принадлежности*	
Стул массажиста MA01	Сумка для стола на колесах
Стул массажиста MA02	Сумка для стола
Стул массажиста MA03	Сумка для кресла
MA04 гамаки	Полукруглая подушка б/н
Полукруглая подушка	Подголовник тип А
Круглая подушка	Подголовник тип В
Защитный валик	Простыня из 100% хлопка
Подушка с отверстием	Подлокотники
Спинной расслабляющий мат	Фиксатор для подголовника
Ремень массажиста	Полка для рук
Боковые полки для рук	Удлинитель стола
Полка (держатель) для бумаги	Камни для ступн терашини

*поставляется опционально

Покрывало стола изготавливается из винилскожи (искусственная кожа), для смягчения, проложенной пенополиуретаном.



Рекомендации по уходу за покрытием массажного стола.

- **Избегайте хранения Вашего стола в очень холодных условиях.** Чрезмерный холод вызовет трескание покрытия, так что не оставляйте стол в багажнике Вашего автомобиля или в не обогреваемых помещениях в холодное время года.
- **Оберегайте изделие от повышенного теплового воздействия.** Чрезмерное тепловое воздействие вызовет растяжение и появление складок и морщин на покрытии. Таким образом держите стол подальше от обогревателей, электрообогревателей, избегайте попадания на покрытие прямого солнечного света и храните изделие в багажнике Вашего автомобиля в жаркое время года.
- **Ежедневно чистите покрытие.** Мы рекомендуем протирать стол слабым моющим средством для защиты от масляных пятен и грязи, которые могут вызвать трещины на покрытии. Вы можете использовать обычные бытовые моющие средства. Средства с повышенным содержанием спирта могут с течением времени привести к образованию трещин. Вы можете проводить дезинфекцию стола и аксессуаров после каждой процедуры или раз в день для удаления бактерий и др. В качестве безопасного дезинфицирующего средства мы рекомендуем 5%-ый раствор хлора.
- **Используйте чехол.** Мы предлагаем специальный чехол для защиты стола от царапин, потертостей и т.п. при транспортировке.