

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

7728 Леггинсы компрессионные, женские



Действие

Разработаны с учетом анатомических особенностей женской фигуры. Обеспечивают равномерное поддерживающее воздействие на мышцы бедра, ягодичные мышцы и мышцы голени, хороший воздухообмен и влагопроницаемость с оптимальным прилеганием к телу.

Показания

Профилактика при повышенных спортивных нагрузках. Растяжения, миозиты и др. патологии костно-мышечной системы с болевым синдромом в области бедра или пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Состав

Polyester 84%, Spandex 16%.

Применение

- 1) Наденьте леггинсы (возможно ношение с тренировочной и официальной спортивной формой во время соревнований).
- 2) Осуществите оптимальную подгонку с помощью шнура на поясничном отделе.

Важно!

- 1) Если у Вас есть вопросы о применении изделия, связывайтесь с импортером или дистрибьютором, осуществившим продажу.
- 2) Изделие не жаростойкое, избегайте воздействия температур свыше 120 °С.
- 3) Время использования изделий из Thermoprene® не должно превышать 3–4 часов.
- 4) Если у Вас аллергия на латекс или резину, перед использованием изделия рекомендуем проконсультироваться с врачом. Состав изделия указан выше.
- 5) При наличии тепловой аллергии рекомендуем не использовать изделия, содержащие Thermoprene®.

Изделие не должно контактировать с жировыми и кислотными средствами, мазями и лосьонами. Это может привести к сокращению срока службы, прежде всего, текстильных элементов.

Инструкции по стирке

- 1) Стирать при температуре 40 °С.
- 2) Рекомендуется использовать сетчатый мешочек для стирки.
- 3) Расправьте изделие во влажном состоянии и высушите его вдали от отопительных приборов.

Гарантия

Изготовитель несет ответственность только в случаях применения изделия по его прямому назначению и при оговоренных условиях. Изделие испытано и сертифицировано по стандарту ISO.

Заявление о соответствии

Как изготовитель изделия Компания «ОТТО БОКК» берет на себя полную ответственность, заявляя, что изделие соответствует требованиям Директивы Евросоюза 93/42/ЕЕС.

