



ПАСПОРТ

И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала эксплуатации подробно
ознакомьтесь с настоящим
Руководством!

Ячеистый



Трубчатый



Матрас противопролежневый Armed

www.armed.ru

ВВЕДЕНИЕ

Матрас противопролежневый Armed: трубчатый, ячеистый (далее по Руководству - матрас) - представляет собой противопролежневую систему, состоящую из матраса и компрессора (ромбовидные ячейки, трубы).

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пользователя или повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

Медицинские показания и противопоказания устанавливаются врачом.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещается прыгать и ходить по матрасу, в том числе и детям;
 - Эксплуатируйте матрас только в чехле во избежание потери его свойств;
 - Не допускается эксплуатация компрессора в запыленной и влажной среде;
 - Берегите матрас и компрессор от попадания жидкостей и химикатов;
 - Периодически проверяйте воздушный фильтр компрессора, не допускайте его загрязнения;
 - Переворачивайте матрас раз в 1-3 месяца и раз в год меняйте положение голова-ноги. Это необходимо для восстановления слоев настила в процессе эксплуатации;
 - Используйте матрас на сплошной ровной горизонтальной поверхности или на качественном ортопедическом основании с упругими ламелями;
 - Запрещается сгибать, сворачивать или складывать матрас;
 - Избегайте контакта матраса с колющими-режущими предметами;
- К ласс электробезопасности компрессора соответствует классу защиты II.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Матрас	Ячеистый	Трубчатый
Габаритные размеры (ДхШхВ) ($\pm 10\%$), мм	2000x900x63-85	2000x900x100
Габариты воздушного компрессора ($\pm 5\%$), мм	270x140x100	270x140x100
Напряжение питания компрессора ($\pm 10\%$), В	220	220
Потребляемая мощность, Вт	14	14
Рабочее давление, кПа	100-170	100-170
Длительность цикла ($\pm 5\%$), мин	7-12	7-12
Режим работы компрессора	непрерывный	непрерывный
Масса (нетто/брутто) ($\pm 10\%$), кг	4,1/4,5	6/6,5
Макс. нагрузка (не менее), кг	120	150
Пролежни (степень)	средняя	высокая
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ) ($\pm 10\%$), мм	300x190x180	340x210x335


ОПИСАНИЕ

Матрас может комплектоваться антисептическим покрывалом по усмотрению производителя. Возможна комплектация компрессором с режимом «Статика».

Компрессор изготовлен из АБС пластика, что обеспечивает надежную изоляцию, ячеистый матрас выполнен из ПВХ материалов, трубчатый из нейлоновой ткани.

Компрессор имеет эргономичный дизайн и простое управление.

1. кнопка включения
2. регулятор давления
3. индикатор нормального давления (зеленый индикатор)
4. индикатор пониженного давления (желтый индикатор)
5. кнопка статической функции (при наличии функции «Статика»)

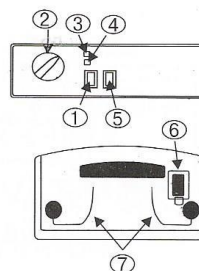

6. воздушный фильтр
7. крючки для подвешивания

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите насос на плоскую, жесткую поверхность или на поручни ножного отдела кровати, используя крючки на корпусе насоса.
2. Расстелите матрас на кровати. Вход для соединительных трубок должен быть расположен в ножной секции кровати.
3. Подсоедините компрессор к матрасу с помощью соединительных трубок.
4. Убедитесь, что трубки не заломлены и не проходят под матрасом.
5. Включите компрессор, для этого установите кнопки питания (1) и режима «Статик» (5) в положение «ВКЛ». Воздух начнет поступать в матрас.
6. Застелите матрас хлопковой простыней.
7. Когда давление воздуха достигнет нормы (загорится зеленый индикатор), отключите режим «Статик», при этом ячейки(трубки)матраса будут циклически надуваться. Матрас готов к эксплуатации.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Уложите пользователя.
2. Отрегулируйте давление, выбрав регулятором давления соответственно между «MIN» и «MAX» в зависимости от веса пользователя и комфортности. Оптимальный вариант когда между телом пациента и ненадутой частью матраса проходят два пальца руки.
3. Для включения статической функции установите кнопку 5 в положение «ВКЛ», при этом все ячейки надутятся одновременно, обеспечивая статичную поверхность матраса. Это позволяет с легкостью менять положение пациента при проведении процедур или кормлении.
4. При выключении статической функции система работает в обычном режиме.

ВНИМАНИЕ



РЕЖИМ РАБОТЫ КОМПРЕССОРА КРУГЛОСУТОЧНЫЙ

ЧИСТКА

КОМПРЕССОР

Проверяйте воздушный фильтр 1 раз в месяц. В случае загрязнения помойте фильтр мягким моющим средством, высушите и установите на место.

Корпус компрессора протирайте тканью, смоченной 25% раствором нашатырного спирта.

МАТРАС

Рекомендуем проводить сухую чистку с помощью пылесоса. Сушите матрас на воздухе, не применяя утюга.

Производите дезинфекцию матраса в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. Наружные поверхности матраса обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Вид неисправности	Причины	Методы устранения
Матрас не накачивается	Индикатор включен	Отсоединена трубка Присоединить ее
		Матрас проколот Заклейте прокол
	Индикатор выключен	Не подключено питание Подключите питание
Матрас надувается не полностью	Матрас очень мягкий	Давление минимально Поверните регулятор давления направо
		Матрас трещит Разверните его и вымойте
		Воздушный фильтр загрязнен из-за долгого использования Замените фильтр

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Матрас в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Матрас транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение матраса без упаковки завода-изготовителя не гарантирует его сохранность. Повреждения матраса в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.

Матрас не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация матраса осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Трубка соединительная (сдвоенная) _____ 1 шт.
2. Компрессор воздушный _____ 1 шт.
3. Матрас _____ 1 шт
4. Предохранитель 1,5 А _____ 2 шт.
5. Воздушный фильтр _____ 1 шт.
6. Руководство _____ 1 экз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Матрас противопролежневый Armed: ячеистый, трубчатый соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07068 действительно с 09.06.2010 г

Изготовитель: Jiangsu Dengguan Medical Treatment Instrument Co., Ltd. ,

№17 Danfeng West Road, Jintan City, Jiangsu Province, 213200, China

"Джиангсу Дэнгуан Медикал Тритмент Инструмент Ко.Лтд",

№17 Данфенг Вест Роад, город Джинтан, провинция Джангсу, 213200, Китай

Дистрибьютор: ООО «Медконтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н, тел.: (812) 702-73-02

Срок службы - не менее 3 лет.

Гарантийный срок на матрас противопролежневый Armed: ячеистый, трубчатый –12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.

На быстро изнашивающиеся части и расходные материалы гарантия не распространяется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента

Сервисный центр: ООО «Медконтракт»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н

Телефоны сервисных центров

Моск. обл. г. Балашиха: (495) 989-12-89

г. Санкт-Петербург: (812) 702-73-02

г. Екатеринбург: (343) 357-33-61

www.armed.ru

Торговая марка «АРМЕД» (495) 989-12-88, (812) 702-73-02, (343) 286-42-73