

По мере появления положительной динамики и развития улучшений контроля ребенком своего тела можно ослабить крепления. Для безопасности, крепежные ремни и пояса рекомендуется ослаблять, а не снимать полностью. Последовательность ослабления креплений: грудное крепление, тазовое крепление, крепление коленей и в последнюю очередь крепление стоп.



**ВНИМАНИЕ! Решение по ослаблению креплений принимается только лечащим врачом. Не ослабляйте крепления не посоветовавшись со специалистом!**

#### Правила хранения и ухода.

До эксплуатации изделие необходимо хранить в упаковке. Перед первой эксплуатацией следует произвести проверку комплектности изделия, установить съемный матрасик под спину и необходимые крепления. Рекомендуемые условия хранения: в сухом помещении при температуре воздуха от - 5 до +30 градусов Цельсия. Срок хранения - не более 12 месяцев с даты выпуска изделия. Дата выпуска указана в гарантийном талоне. При транспортировке изделия запрещается подвергать ударным нагрузкам. Опора для стояния ОС-210.2. нуждается в тщательном уходе. Периодически следует очищать рабочие поверхности от возможных загрязнений. Рекомендуется после каждого использования опоры протирать поверхности влажной тряпочкой. При наличии серьезных загрязнений - использовать разрешенные к применению гигиенические и моющие средства. Запрещается погружать изделие или части изделия в воду. Покрытие металлических и деревянных частей изделия является стойким, но при этом следует избегать воздействия твердыми и острыми предметами на окрашенные поверхности. Изделие обладает длительным сроком эксплуатации и надежностью, однако, если вы заметили неисправность, прекратите или не начинайте использование изделия и не пытайтесь исправить неисправность самостоятельно. Обратитесь к дилеру, у которого было приобретено изделие или в ближайший магазин, торгующий товарами для инвалидов.




**Пренебрежение рекомендациями производителя и небрежный уход могут привести к сокращению срока службы изделия.**

#### Гарантийные обязательства производителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие опоры требованиям технических условий при соблюдении требований к эксплуатации, транспортировке и хранению, установленных в настоящем Руководстве.

Гарантийный срок службы установлен равным 24 месяца со дня выдачи опоры пользователю (либо приобретения пользователем). В течение гарантийного срока в случае неисправности предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет опору либо её составные части при соблюдении владельцем опоры требований к её эксплуатации, транспортировке и хранению.

Предприятие-изготовитель не несёт вышеуказанных гарантийных обязательств в случае ненадлежащей эксплуатации опоры (нарушении инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию и уходу). Предприятие-изготовитель не несёт вышеуказанных гарантийных обязательств при появлении на опоре трещин и изломов, если они вызваны недопустимыми ударными нагрузками, о чем свидетельствует наличие вмятин и трещин.

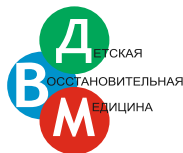


**ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»**

620035, Россия, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 8-1

Выставочный зал: г.Екатеринбург, ул. Кислородная, 8-А, строение «К»

тел/факс: (343) 383-11-95, 383-11-96 e-mail: info@dvm-reab.ru

[www.dvm-reab.ru](http://www.dvm-reab.ru)

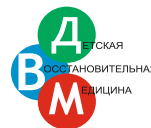

ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»

## ПАСПОРТ

### Руководство по эксплуатации, гарантийный талон

#### Опора для стояния ОС-210.2. «Жирафик»

арт. 210.2.01., арт. 210.2.02, арт. 210.2.03

Руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования изделия как в условиях стационара, так и в домашних условиях.



**Сохраняйте данное руководство и паспорт изделия на всё время эксплуатации.**

#### Общие сведения

Опора для стояния ОС-210.2. «Я Могу!» («Жирафик») изготовлена в соответствии с ТУ 9398-001-91079148-2011, регистрационное удостоверение № ФСП 2011/11517. До установки опоры в эксплуатацию изучите данное руководство. При возникновении вопросов относительно эксплуатации изделия, качества и особенностей изделия, просим обращаться к официальным представителям производителя в Вашем регионе или непосредственно в ООО НПП «ДВМ» по телефонам : (343) 383-11-95, 383-11-96.

Для производства изделия использованы материалы, безопасность которых гарантируется сертификатами качества : фанера высококачественная экологически чистая, металлическая профильная труба со стойким цветным порошковым покрытием, винилискожа, поролон, фурнитура. Деревянные части опоры покрыты экологически чистой смесью натуральных масел с твердым воском, стойкой к обработке традиционными средствами.

#### Краткое описание и назначение

Принятие вертикального положения ребенком с ограниченными возможностями - это чрезвычайно важный элемент сложного процесса реабилитации. Опора для стояния - вертикализатор-стойка ОС-210.2.«Жирафик» разработан для использования в процессе интенсивной и постоянной реабилитации детей, не имеющих возможности самостоятельно стоять и сидеть.

Опора для стояния ОС-210.2. «Жирафик» , вертикализатор стойка для детей с ограниченными возможностями. Основное предназначение детского вертикализатора стойки: пассивные реабилитационные мероприятия, направленные на адаптацию ребенка к вертикальному положению, формирование чувства равновесия, адаптацию кровеносной системы и внутренних органов к новым нагрузкам. Опора применяется при патологических состояниях, когда пациент не имеет возможности стоять самостоятельно.

Металлическая рама со стойким к обработке цветным порошковым покрытием, на 4 колесах с тормозами, обеспечивающими возможность перемещения ребенка в вертикализаторе внутри помещения.

Крепления для стоп типа «сандалии», с жестким пяточным упором, с независимой регулировкой положения стоп ( влево-вправо и вперед-назад), регулировкой расстояния между стопами.

Инновационная система коленопоры. Коленопоры независимо регулируются по высоте, глубине и расстоянию между коленями.

Прочный широкий бедренный ремень с изменяемой длиной, регулируемый по высоте. Крепится к специальным направляющим. Широкий грудной ремень с подушкой на спину, с регулировкой по высоте, регулируемый по длине.

В комплект поставки входит столик для занятий и приема пищи, регулируемый по высоте. Регулировки опоры для стояния ОС-210.2. «Жирафик» : высота столика, высота пояса, высота боковых упоров и грудного крепления, независимая регулировка коленопоры в трех плоскостях, регулировка креплений для стоп.



**Решение по целесообразности использования изделия, интенсивности и периода использования принимает лечащий врач.**

ОС-210.2. «Жирафик» выпускается в 3 размерах:  
 арт.210.2.01 - для детей ростом до 110 см, весом до 35 кг,  
 арт.210.2.02 - для детей ростом до 140 см, весом до 55 кг,  
 арт.210.2.03 - для детей ростом до 175 см, весом до 75 кг.



- 1 - столик
- 2 - вертикальные телескопические стойки
- 3 - грудной пояс
- 4 - бедренный пояс
- 5 - независимо регулируемые коленопоры
- 6 - площадка для ног
- 7 - колесная рама

#### Комплектация

№ п/п	Описание	Количество
1.	Верхний элемент с грудным и тазобедренным ремнями	1
2.	Основа на колесах с тормозами и системой крепления стоп	1
3.	Центральный элемент с системой коленных креплений	1
4.	Ключ шестигранный	1



**Все регулировки в процессе эксплуатации опоры ОС-210.2. «Жирафик» выполняются без применения специального инструмента.**



рис.2

Верхний элемент с грудным и тазобедренным ремнями



рис.3

Основа на колесах с тормозами и креплениями для стоп



рис.4

Центральный элемент с коленной обоймой

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение		
	212.2.01	212.2.02	212.2.03
Высота	Регулируемая	Регулируемая	Регулируемая
Высота стола (от основы) в диапазоне	55 – 78 см	78 – 100 см	100 - 155
Грудной и тазобедренный ремни, регулируемые по высоте			
Коленные крепления, регулируемые по высоте и расстоянию между креплениями			
Регулировка расстояния между коленями, в диапазоне	13 – 24 см	13 – 24 см	13 – 24 см
Регулировка коленных креплений по высоте в диапазоне	15 – 50 см от креплений стоп	15 – 50 см от креплений стоп	15 – 50 см от креплений стоп

#### Требования к безопасности

Опора ОС-210.2. «Жирафик» предназначена для использования в помещениях, не пытайтесь использовать изделие на улице. Не допускается эксплуатация опоры в помещениях с непрочным полом и на поверхности, имеющей значительные неровности.



**Перед каждым использованием проверяйте опору на наличие серьезных повреждений. При обнаружении таковых и при сомнениях в возможности использования изделия, ни в коем случае не используйте опору.**

**В случае обнаружения неисправности, не пытайтесь исправить самостоятельно, обратитесь за консультацией к дилеру, у которого приобретали изделие или непосредственно в сервисную службу производителя по тел.: (343) 383-11-95 ( 96).**

#### Подготовка и порядок эксплуатации



**Опора для стояния ОС-210.2. «Жирафик» поставляется в разобранном виде. Пошаговая инструкция по сборке находится в конце данной инструкции. Инструмент, необходимый для сборки изделия, входит в комплект поставки.**

Не рекомендуется помещать ребенка на опору при выраженном беспокойстве или плаче. Необходимо успокоить ребенка. В большинстве случаев необходима дополнительная предварительная подготовка - массаж, растяжки. При наличии контрактур ноги ребенка необходимо зафиксировать ортезами. На ногах обязательно должна быть одета специальная ортопедическая обувь. Установить опору на ровную поверхность (пол). Колеса зафиксировать тормозами. Расстегнуть грудной и бедренный пояса. Расстегнуть ремни креплений для ступней. Расстегнуть ремни коленопор. Поднять столик на необходимую высоту. Закрепить крепежными барашками.



**Решение по целесообразности использования изделия, интенсивности и периода использования принимает лечащий врач.**

**В целях обеспечения безопасности, закрепление ребенка в опоре для стояния производят 2 человека, один из которых удерживает ребенка, а второй производит закрепление.**

Удерживая ребенка в вертикальном положении, зафиксировать стопы в креплениях для стоп. Пятки должны упираться в пяточные упоры. Отрегулировать положение коленопор по высоте, выставить коленопоры в необходимое положение ( регулировка по ширине, расстоянию между коленопорами). Зафиксировать коленные суставы в коленноупорах крепежными ремнями. Подкорректировать высоту столика, тщательно закрепить выбранное положение крепежными барашками. Зафиксировать грудной отдел при помощи грудного пояса. Закрепить бедренный пояс на мягких направляющих, предварительно выбрав необходимую высоту и положение.



**ВНИМАНИЕ! Все манипуляции производятся обученным персоналом. При высаживании ребенка необходимо строго соблюдать рекомендации лечащего врача.**