



КОТЕНОК 2™

ДЕТСКИЙ ВЕРТИКАЛИЗАТОР



ИНСТРУКЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Our passion - your independence!

AKCESMED[®]



ВНИМАНИЕ! Производитель несет ответственность за правильное функционирование изделия исключительно в случае покупки его у квалифицированного сотрудника фирмы Akces-Med Sp. z o.o или в специальном магазине медицинских изделий.



ВНИМАНИЕ! Akces-MED Sp. z o.o. оставляет за собой право введения технических и коммерческих изменений в содержание инструкции без предварительного предупреждения. Любое изменение будет определяться датой последней актуализации.

Изделие медицинского назначения кл. 1 – удовлетворяющее все требования Европейской Директивы (93/42 / EWG) в соответствии с Положением о медицинских изделиях. Производитель предоставил декларацию соответствия ЕС.

Фирма AKCES-MED имеет внедренную систему управления качеством согласно с нормами ISO 13485 в процессе проектирования всей продукции, продажи и сервиса. Система сертифицирована Det Norske Veritas.





ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ.....	5
2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ.....	5
3. ОБЩЕЕ СТРОЕНИЕ ВЕРТИКАЛИЗАТОРА КОТЕНОК 2.....	6
3.1 Стандартная комплектация.....	6
3.2 Дополнительная комплектация.....	7
4. ВЕС И ГАБАРИТЫ.....	7
5. ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ.....	8
6. ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЕРТИКАЛИЗАТОРА КОТЕНО 2.....	9
6.1 Настройка выдвижения платформы.....	9
6.2 Настройка стабилизатора туловища.....	10
6.3 Настройка стабилизатора колен.....	11
6.4 Настройка подголовника.....	12
6.5 Настройка подошвы фиксирующей ступни.....	12
6.6 Настройка столика.....	14
7. МОНТАЖ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ.....	15
8. РЕГУЛИРОВКА УСТРОЙСТВА К ЗАДНЕЙ ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ.....	16
9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ.....	17
9.1 Подготовка пациента.....	17
9.2 Инструкция по использованию изделия.....	18
9.3 Вертикализация.....	20
10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.....	22
11. КОНСЕРВАЦИЯ И ЧИСТКА.....	25





ВВЕДЕНИЕ

Вертикализатор разработано, чтобы помочь в процессе реабилитации детей с парезом нижних конечностей и туловища, делают возможным принятие стоячего положения. Использование древесины и живой облицовочной расцветки, симпатичного рисунка котенка способствует принятию ребенком вертикализатора более в качестве игрушки, чем как реабилитационное оборудование.

Это универсальное устройство, в котором можно посадить или поставить детей очень вялых со сниженным мышечным тонусом, а также детей с проблемой сильного напряжения мышц. Вертикализатор является универсальным устройством из-за широкого диапазона регулировки, которая будет представлена дольше в этой инструкции.

Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Благодаря своей простоте вертикализатор является необыкновенно ценным устройством в реабилитации людей с ограниченными возможностями в домашних условиях и в больницах, реабилитационных отделениях, а при правильном использовании значительно улучшает качество жизни детей.

Упрашивается внимательно прочесть эту инструкцию. Здесь Вы сможете найти информацию о нашем изделии и узнать, как безопасно и эффективно его использовать.

Если у Вас возникнут вопросы или замечания, пожалуйста, свяжитесь с **медконсультантом нашей фирмы**: mobile +48 508 382 509

Akces-MED Sp. z o. o. по телефону: ph. +48 17 864 04 77

e-mail: export@akces-med.com

Благодарим Вас за доверие и покупку изделия в нашей фирме.



ВНИМАНИЕ! Перед употреблением изделия пользователь обязан ознакомиться с этой инструкцией. Пожалуйста, помните о том, что применение изделия согласно рекомендациям, содержащимся в этой инструкции, позволит безопасно его использовать и способствует сохранению его прочности и эстетики.





1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ

Настоящая инструкция содержит основную информацию: как правильно пользоваться **КОТЕНОК 2™**, подготовить изделие к работе, как хранить и чистить коляску, а также условия гарантии. Руководство это следует хранить в легко доступном месте. Инструкция предназначена для лиц ухаживающих непосредственно за больными, а также для врачей и физиотерапевтов обслуживающих изделие.



ВНИМАНИЕ! Перед использованием **КОТЕНОК 2™** пользователь обязан ознакомиться с этой инструкцией.

Пожалуйста, помните о том, что применение продукта согласно рекомендациям, содержащимся в инструкции, позволяет безопасно его использовать и способствует сохранению его прочности и эстетики.

2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ

Изделие рекомендуется для больных, у которых установлено:


- ДЦП разных типов
- Повреждения мозга и спинного мозга разного происхождения с параличем конечностей, тяжелой потерей равновесия и координации движений
- Демиелинизирующие заболевания (рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз и другие)
- Черепно-мозговая грыжа
- Мышечные болезни с сопутствующим параличем и парезом (дистрофия, миастения, миозит).
- Генетические болезни с параличем конечностей
- Дегенеративные и неврологические заболевания
- Другие болезни с сопутствующими параличем, парезом, повреждениями двигательного аппарата
- После черепно-мозговых травм или повреждений позвоночника с повреждением спинного мозга и сопутствующим параличем или парезом



3 ОБЩЕЕ СТРОЕНИЕ ВЕРТИКАЛИЗАТОРА КОТЕНОК 2

3.1. Стандартная комплектация

1. Рама на колесах
2. Стабилизатор ступней
3. Стабилизатор колен
4. Бедренные пелоты
5. Грудные пелоты
6. Ремень для стабилизации бедер
7. Ремень для стабилизации грудной клетки
8. Подголовник (применяется во время задней вертикализации)

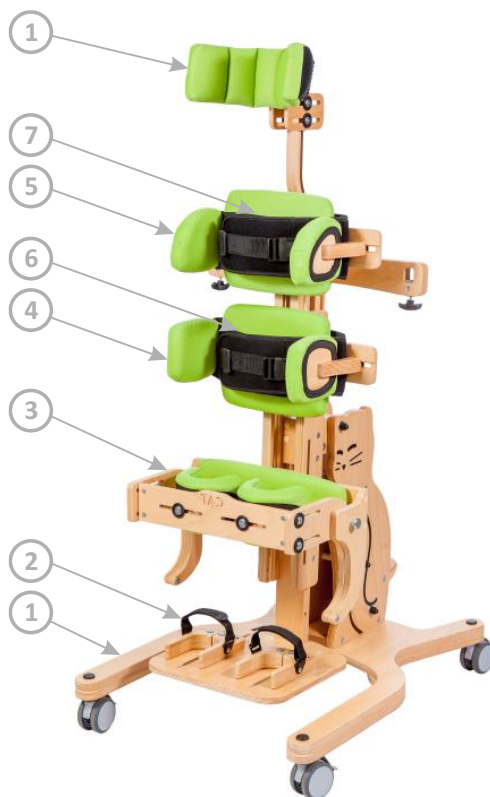




3.2. Дополнительная комплектация

 <p>КТИ_003</p>	 <p>КТИ_015</p>	 <p>КТИ_016</p>
Мягкая накладка на столик	Колесо Танго (75 mm)	Колесо Танго (125 mm)
 <p>КТИ_102</p>	 <p>КТИ_103</p>	 <p>КТИ_401</p>
Ремень поддерживающий голову	Подшвы с регулировкой в трех плоскостях	Столик для мануальной терапии
 <p>КТИ_403</p>	 <p>КТИ_410</p>	 <p>КТИ_425</p>
Столик	Чехол на подголовник из хлопка	Столик с миской
 <p>КТИ_725</p>		
Медицинская обивка		



4 ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

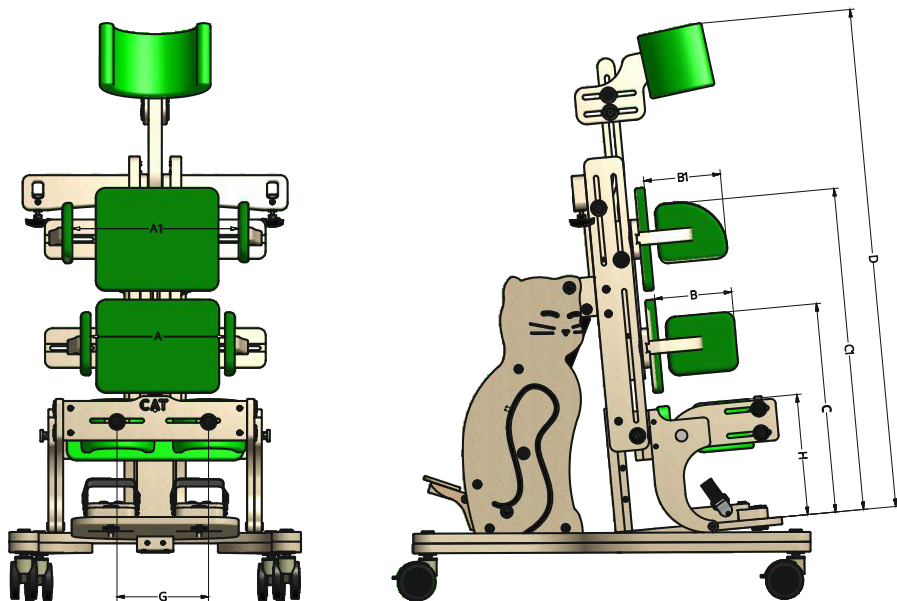

Символ	Измерение	Ед.	Размер 1		Размер 2	
			Передняя	Задняя	Передняя	Задняя
A	Расстояние между бедренными пелотами	[см]	18-31	18-31	14-27	14-27
B	Глубина бедренных пелот	[см]	15	15	15	15
C	Регулировка высоты бедренных пелот	[см]	27-78	40-78	30-59	34-59
A1	Расстояние между грудными пелотами	[см]	18-31	18-31	14-27	14-27
B1	Глубина грудных пелот	[см]	15	15	15	15
C1	Регулировка высоты грудных пелот	[см]	50-97	65-97	46-75	50-75
D	Высота подголовника	[см]	80-135	-	72-106	-
G	Расстояние между коленными пелотами	[см]	14-23	14-23	14-23	14-23
H	Высота коленных пелот	[см]	15-54	15-54	15-31	15-54
	Угол наклона вертикализатора	[°]		0-90		0-90
	Угол наклона вертикализатора	[кг]		35		45
Измерение		Ед.				
	Ширина	[см]		60		60
	Длина	[см]		81		81
	Высота	[см]		85		90
	Вес	[кг]		21		21







5 КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВЕРТИКАЛИЗАТОРОМ

5.1 Настройка выдвигания платформы

является одной из основных настроек устройства для пользователя. Для этого следует:

- Вынуть винт из нижней части вертикализатора ключом на 5 мм , который прилагается к устройству (фото. 5.1),
- установить желаемое положение платформы (фото. 5.2),
- Вставить винт в следующее отверстие и затянуть с помощью гаечного ключа (фото. 5.2).


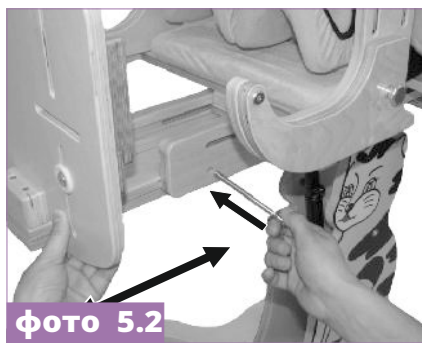
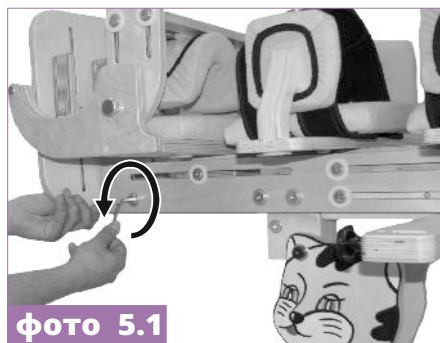




5.2 Настройка стабилизатора туловища

С целью правильной настройки стабилизатора туловища необходимо:

- ослабить винты
- настроить желаемое положение
- затянуть винты гаечным ключом (фото. 5.3)
- настроить положение бедренных подушек
- настроить расстояние между бедренными и грудными подушками (фото. 5.5).


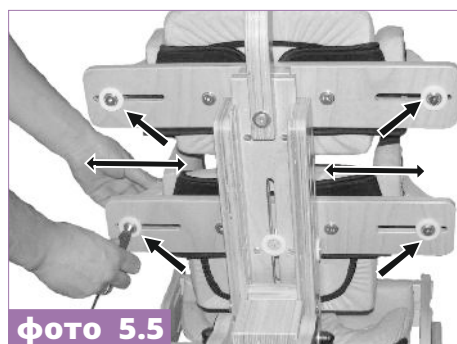
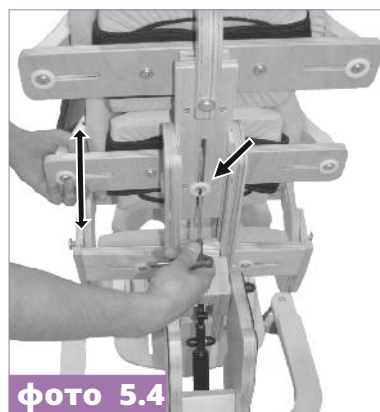
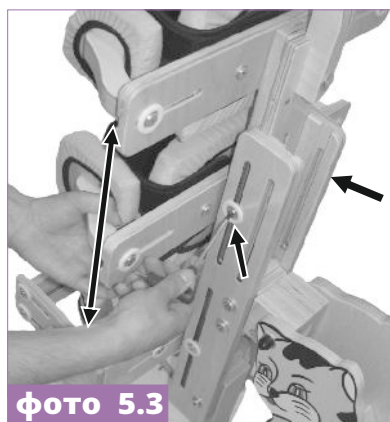




5.3 Настройка стабилизатора колен

С целью правильной настройки стабилизатора колен необходимо:

- настроить положение высоты стабилизатора колен (фото. 5.6);
- настроить расстояние подушек колен (фото. 5.7);
- настроить положение подколенной подушки (фото. 5.8);
- в случае настройки устройства для вертикализации при поддержке; сзади дополнительно следует отрегулировать положение подушек колен (фото. 5.9).

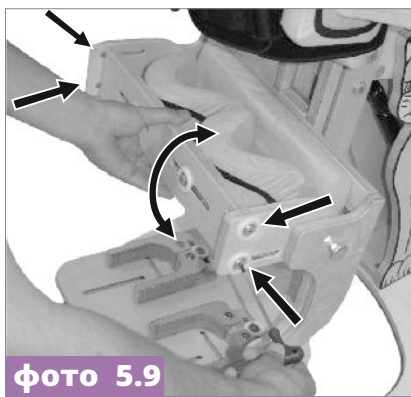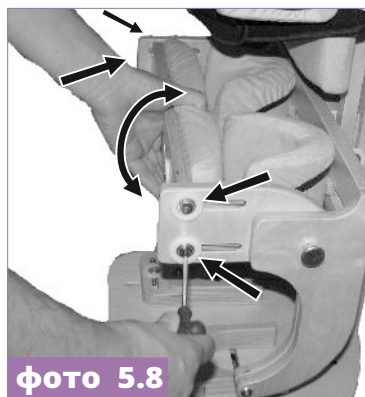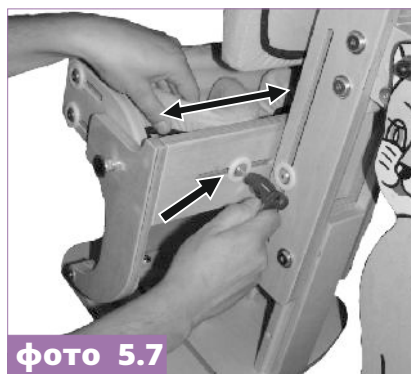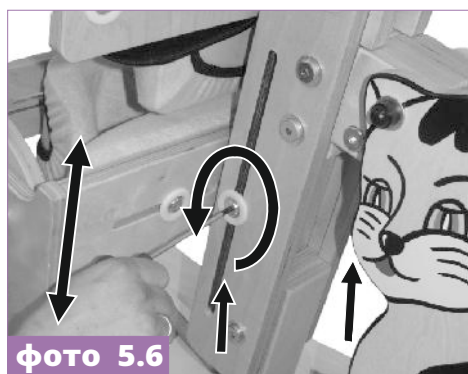



5.4 Настройка подголовника

Подголовник используется только при задней вертикализации. Способ его установления указан в разделе 7 на фото 1.

Для правильного установления подголовника следует:

- Установить высоту, соответственный угол положения относительно головы пациента и его смещение вперед (фото 5.10),
- затем соответственно приспособить подголовник к величине головы ребенка (фото 5.11).



5.5 Настройка подошвы фиксирующей ступни

а) Блокировки

С целью соответствующей настройки блокировок подошв фиксирующих ступни следует:

- установить положение и расстояние блокировок (фото. 5.12)
- установить ширину блокировок в соответствии с обувью, в которой ребенок будет вертикализировано (фото. 5.13).





фото 5.12



фото 5.13

в) Регулируемые подошвы в трех плоскостях (Дополнительное оборудование)

Если устройство оснащено регулируемыми подошвами в трех плоскостях следует настроить расположение и расстояние подошв (фото. 5.14), наклон подошв в стороны (фото. 5.15).



фото 5.14






фото 5.15



6 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

6.1 Настройка столика

Способ установки и угла положения столика представлен на рисунках 6.16, 6.17 и 6.18. Если во время вертикализации при поддержке сзади необходимо дополнительное снижение столика, выходящее за пределы стандартной настройки, следует повернуть скобку так, как показано на фото.6.19

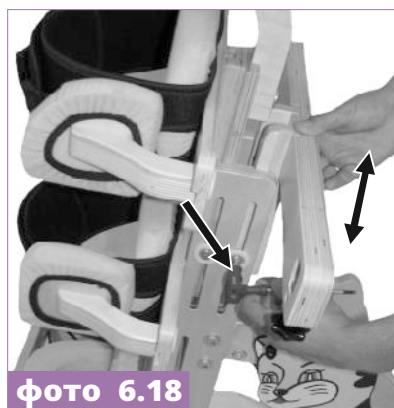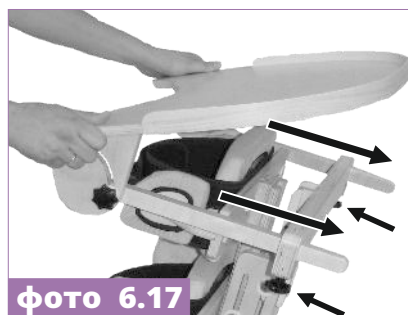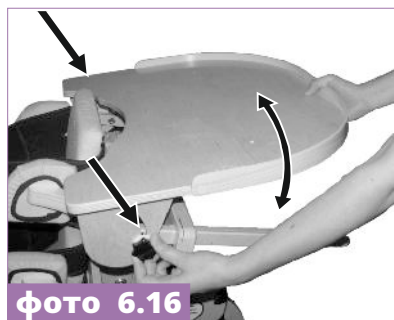



6.2 Столик для мануальной терапии

Столик для мануальной терапии должен устанавливаться после процесса вертикализации. С целью настройки столика следует положить его на базовом столе и закрутить од нижней части двумя винтами, так как изображено на фото. 6.20 и 6.21.



фото 6.20

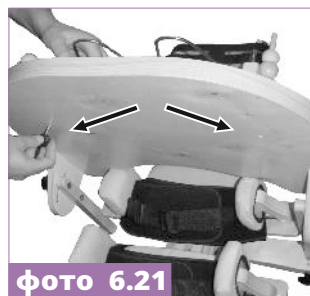


фото 6.21

6.3 Ремень, поддерживающий голову

Ремень крепится на липучках к задней части подголовника (фото. 6.22). Он используется только для настройки устройства при задней вертикализации.



фото 6.22

6.4 Мягкая накладка на столик

Для установления мягкой накладки на столик, следует

- На доску столика наклеить 5 самоклеящихся липучек
- Наложить накладку таким образом, чтобы края накладки совпадали с краями столика



фото 6.23








фото 6.24



7 РЕГУЛИРОВКА УСТРОЙСТВА К ЗАДНЕЙ ВЕРТИКАЛИЗАЦИИ

С целью подготовки устройства к задней вертикализации следует:

- 1 - прикрепить подголовник
- 2 - откинуть скобки столика
- 3 - откинуть подушки, поддерживающие колена
- 4 - откинуть блокираторы в стабилизаторе подошв

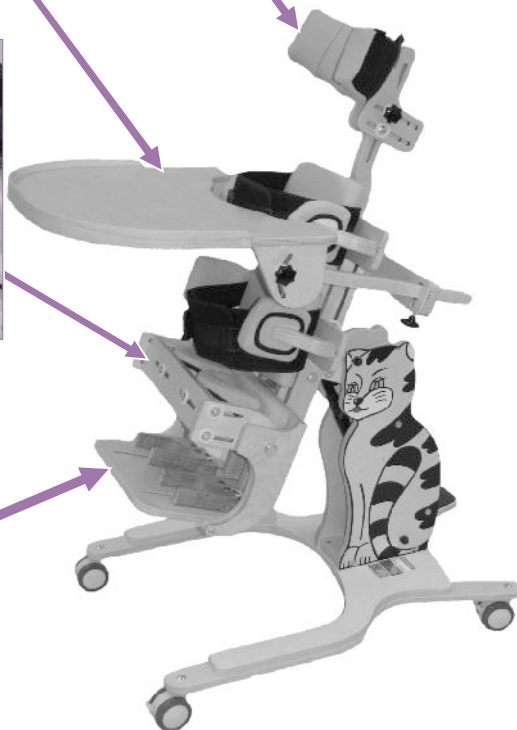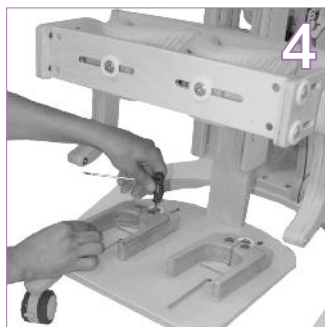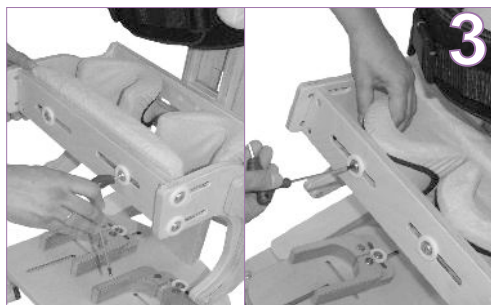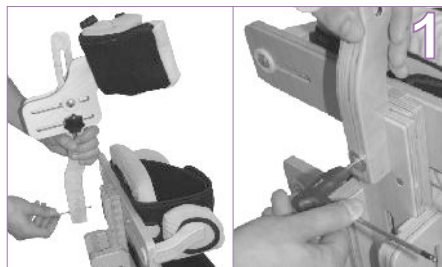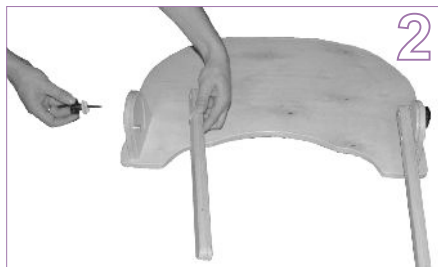



8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ



ВНИМАНИЕ! Вертикализатором **КОТЕНОК 2™** следует пользоваться согласно указаний этой инструкции, только в присутствии обученного персонала. Перед использованием подготовить изделие и пациента!

8.1. Подготовка пациента

Перед использованием изделия следует позаботиться о том, чтобы:

- одежда пациента была легкая, не сковывающая движений, лучше спортивная,
- обувь была удобная, глубокая, высоко шнурованная, надежно стабилизирующая голеностопный сустав,
- пациент не находился в изделии без одежды защищающей тело в местах контакта с обивкой с целью соблюдения гигиены и предотвращения натирания кожного покрова
- в случае использования дополнительного оборудования типа: катетеров, дренажных труб, сумок и др., они были защищены от выпадения, зажатия, самопроизвольного извлечения, таким образом, чтобы не мешали во время пользования изделием,
- при необходимости применения ортопедического оборудования, (шейный воротник, корсет, ортезы, ортопедическая обувь) одеть их.



ВНИМАНИЕ! Одежда должна защищать кожу пациента от непосредственного контакта тела с обивкой и другими

ВНИМАНИЕ! Решение по применению определенного ортопедического оборудования принимает лечащий врач!





8.2. Инструкция по использованию изделия

1. Для правильного пользования изделием следует:

- разложить устройство;
- установить изделие на ровной поверхности без наклона, оставляя полный доступ к вертикализатору ;
- убедиться, что все части вертикализатора исправны, надежно закреплены и неподвижны;
- нажать тормоза;
- приспособить изделие к размерам пациента;
- заблокировать тормоз;
- Сконфигурировать устройство для заранее выбранного способа вертикализации

Стандартно оборудование всегда настроено для передней вертикализации. Настройка устройства для задней вертикализации представлена в главе 8 данной инструкции.



Внимание! Способ вертикализации выбирает лечащий врач или терапевт!

- Адаптация устройства для пациента
- С целью настройки вертикализатора для положения лежа, следует разблокировать его, нажимая на педаль (фото. 8.1)
- Расстегнуть ремни, поддерживающие грудную клетку бедра и если вертикализатор дополнительно, тогда также ремни, поддерживающие ступни, голову.
- Разблокировать стабилизатор коленей, оттягивая крепления и оборачивая их на 90°, как это представлено на фото. 8.2





фото 8.1

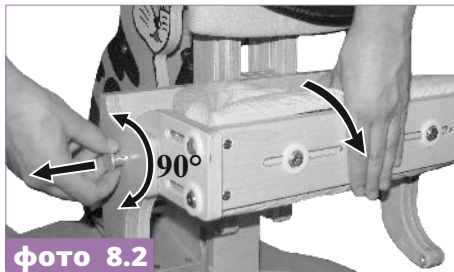


фото 8.2

Устройства будут надлежащим образом выполнять свои функции, если полностью будет адаптировано под рост и вес тела пациента. Главное правило при настройке регулировок вертикализатора обеспечить максимальный комфорт пациенту и чувство безопасности. Не принуждайте пациента принять не естественную для него позицию, это вызовет дискомфорт человека.



ВНИМАНИЕ! Первоначальную настройку устройства к пациенту производит только обученный персонал и продолжает человек, обученный в семье. Правильная настройка устройства является необходимым для обеспечения безопасности и определяет правильный курс реабилитации пациента.

ВНИМАНИЕ! Перед использованием коляской следует убедиться, что все ремни и предохраняющие средства правильно отрегулированы и застегнуты, а крепления регулируемых элементов надежно закреплены!



8.3. Вертикализация

Для вертикализации пациента следует:

1. Подготовить место для вертикализации. Помещение со свободным пространством, безопасно (следует убрать из пола игрушки и другие предметы).
2. Придвинуть вертикализатор как можно ближе места, где находится пациент.
3. Блокировать колеса у вертикализатора, у коляски или у другого изделия, в котором находится пациент.
4. Поместить пациента в изделие и убедиться в том, что все правильно установлено (фото 10.4 и 10.5).



5. Пристегните пациента всеми доступными ремнями и заблокируйте стабилизатор колен, следует также убедиться, чтобы штыри вскочили на свое место (фото 10.1).





6. Убедиться в том, что все ремни и обоймы правильно отрегулированы и застегнуты
7. Удерживая обеими руками пациента вместе с верхней подвижной частью изделия, снять блокирование вертикализатора нажимая на педаль и медленно переместить пациента в нужное положение, затем, отпустив педаль, заблокировать вертикализатор.
8. Установить столик (при задней вертикализации).
9. Для того, чтобы переместить пациента с вертикализатора в другое место, следует выполнить действия в обратном порядке.

ВНИМАНИЕ!

Количество времени для вертикализации индивидуально для каждого пациента. В начале вертикализации следует постепенно увеличивать это время (для адаптации организма к новому положению). Решение о сроке вертикализации принимает лечащий врач или физиотерапевт. Вертикализация пациента должна происходить под присмотром подготовленных лиц!

Рекомендуется отвлекать внимание пациента во время вертикализации:

- манипуляционными играми
- развивающими играми
- стимуляцией через касание и др.

ВНИМАНИЕ! Каждый раз перед использованием вертикализатора следует приспособить его к пациенту



ВНИМАНИЕ! Перед вертикализацией следует убедиться, что все ремни правильно отрегулированы и застегнуты, а крепления регулировочных элементов надежно закручены!

ВНИМАНИЕ! Запрещается оставлять пациента в вертикализаторе без присмотра опекуна!





ВНИМАНИЕ! Неправильно установленное изделие может привести к побочным явлениям, таким как: обмороки, деформация тела, перегрузка суставов и др. При их наличии следует немедленно прекратить пользование изделием, вытащить пациента из вертикализатора и положить отдельно. Если побочные явления не прекращаются, следует немедленно обратиться к врачу. Если побочные эффекты прекратились, следует сообщить об этом лечащему врачу для принятия соответственного решения относительно последующих шагов процесса вертикализации.

9 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ! Вертикализатор **КОТЕНОК 2™** следует использовать согласно указаниям настоящей инструкции. Каждый раз перед использованием следует подготовить изделие и пациента!

Перед решением купить вертикализатор **КОТЕНОК 2™** следует посоветоваться с врачом специалистом или работником по реабилитации для правильного подбора коляски и ее размера. Перед началом использования вертикализатором следует ознакомиться со всеми указаниями находящимися в данной инструкции.

1. Каждый раз, перед использованием вертикализатора, следует:

- проверить вертикализатор на наличие повреждений или других браков, из-за которых пациенту может угрожать опасность во время пользования.
- Следует убедиться, что все элементы исправны и правильно закреплены, а изделие не имеет следов трещин или любой деформации;
- проверить, не раскрутились ли шурупы, гайки и другие нарезные, клеенные и шитые соединения;
- проверить исправность тормозов;
- проверить правильно ли работают пружины;





всегда пользоваться ремнями безопасности, липучки в этих ремнях должны заходить на себя минимум на 8 см;

- приспособить изделие к размерам и нуждам пациента, напр. установление пелот, подножки и др;
 - убедиться, что подвижные части и ручки для регулировки изделия стабильны и заблокированы;
 - обеспечить надежную стабилизацию пациента посредством: жилета, ремней стабилизирующих ступни, пелот, межбедренного клина, подголовника. Это предохраняет пациента от выпадения или выскальзывания из вертикализатора;2. Запрещается пользоваться вертикализатором не по назначению!
3. Запрещается пользоваться изделием при наличии повреждений и если не хватает какой-либо части.
 4. Запрещается оставлять пациента в коляске без присмотра взрослого.
 5. Не следует пользоваться изделием если в близости нет обученного опекуна или медицинского персонала.
 6. Запрещается оставлять пациента в вертикализаторе на неровной поверхности без опекуна, даже при нажатии тормозов
 7. Запрещается спускаться/подниматься коляской по ступенькам, ни с пациентом, ни без него.
 9. Вставить всвертикализатор следует всегда при нажатом тормозе.
 10. Следует обратить внимание, чтобы во время пользования вертикализатором между регулируемых элементов
 11. Несмотря на то, что изделие вместе с обивкой выполнено из материала не поддерживающего горение, во время пользования следует избегать приближения к открытым источникам огня или высокой температуры. Вертикализатор не должен храниться или использоваться в помещениях с высокой влажностью воздуха.
 12. Во время перевозки вертикализатора без пациента следует надежно предохранить ее от возможных повреждений. Изготовитель не несет ответственности за повреждения возникшие при неправильной защите изделия во время транспорта.





ВНИМАНИЕ! Изделие эксплуатируется только внутри помещения!

ВНИМАНИЕ! Изделие содержит мелкие части, которые может проглотить ребенок – это опасно!



ВНИМАНИЕ! Запрещается изменять что-либо в конструкции – это может быть опасно для пациента и приводит к потере гарантии.

ВНИМАНИЕ! Не следует превышать максимально допустимого веса пользователя указанного на заводской табличке, а так же в таблице размеров на стр.7 инструкции.

- 1) AKCES-MED. Sp. z o.o. продает изделия исправны технически, без конструкционных, монтажных, материальных браков и каких-либо повреждений
- 2) Вертикализатор **КОТЕНОК 2™** имеет гарантийный срок 24 месяца считая со дня покупки изделия пациентом. В этот период изготовитель гарантирует бесплатный ремонт, согласно гарантийному талону.
- 3) Повреждения возникшие или обнаруженные после 24-месячного срока можно удалить за счет пользователя. Если изделие подлежит программе возвращения финансов, в таком случае Пользователь может подать заявление в НФЗ о возвращении финансов за оплату ремонта изделия, выполненного в рамках послегарантийного сервиса.
- 4) Изготовитель устанавливает срок пользования изделием на 36 месяцев. После этого срока Пользователь может использовать изделие только при условии предъявления изделия Изготовителю для просмотра. После просмотра Изготовитель повторно устанавливает срок пользования изделием и дату следующего просмотра.
- 5) В случае повреждения изделия следует связаться с дилером, у которого было куплено изделие или с Отделом Обслуживания Клиента в фирме AKCES-MED (тел. 17/ 864 04 70).





10 КОНСЕРВАЦИЯ И ЧИСТКА

КОТЕНОК 2™ является медицинским оборудованием, поэтому следует хранить его в чистоте и пользоваться им по инструкции. Изделие хранить в чистом, сухом, вентилируемом помещении. Консервацию и чистку производить минимум раз в месяц. Своевременная чистка коляски необходима для правильного и безопасного функционирования изделия.

Для соблюдения эстетики коляски следует выполнять ее консервацию. Для этого следует выполнять следующее:

1. Рекомендуется мыть обивку теплой водой мягкой тряпкой с применением мягких общедоступных моющих средств. Применение слишком мокрой тряпки приводит к расширению пятен, повреждению обивки или пенки внутри ее. Следует помнить об удалении излишка влаги с ткани перед повторной чисткой. После выведения пятен, обивку ополоскать теплой водой с применением чистой белой тряпки.
2. Обивку не следует замачивать!
3. Не рекомендуется применять твердую щетку.
4. Запрещено чистить обивку сильнодействующими химическими моющими средствами, такими как: растворитель, ядовитые вещества, хлорка.



CAUTION! Фирма Akces-MED Sp. z o.o. не несет ответственности за повреждения нанесенные вследствие применения несоответственных моющих средств.

5. Не допускать промокание обивки во время чистки. Каждый раз перед использованием коляски обивка должна быть сухой!
6. Запрещается чистить, производить замену частей, заниматься консервацией коляски во время использования ее пациентом.
7. Металлические и пластмассовые элементы следует чистить вручную с помощью общедоступных моющих средств для искусственных веществ, ознакомившись с указаниями производителя моющих средств.





ВНИМАНИЕ! Каждый раз перед использованием коляски обивка всегда должна быть сухой!

Перед использованием изделия следует:

- почистить колеса от грязи;
- проверить, приподняв основу, закручены ли надежно все колеса, не испорчены ли они, блокируют ли тормоза вращающееся колесо;
- убедиться, что деревянные части не имеют выступающих осколков (напр. столик);
- проверить, или конструкция коляски не имеет следов трещин или других деформаций;
- проверить, или все подвижные части двигаются в полном объеме, а все шурупы, гайки, ручки и др. Укомплектованы и надежно закручены;
- проверить, или ремни жилета, ремни туловища, ремни стабилизирующие ступни и др. не потеряны, изношенные, а пряжки и застежки работают правильно.



ВНИМАНИЕ! Производитель несет ответственность только в случае скрытых браков или повреждений вследствие правильного пользования изделием. Только в случае точного следования настоящим рекомендациям, ответственность за правильное функционирование коляски возлагается на производителя.

ВНИМАНИЕ! В случае какого-либо повреждения изделия следует связаться с уполномоченным продавцом, у которого было куплено изделие.





ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ



Akces-MED Sp. z o.o.

Jasionka 955B

36-002 Jasionka

tel. (17) 864 04 77

www.akces-med.com

e-mail: export@akces-med.com

Уполномоченный Дилер



Дата издания: **06.10.2010** Дата последней актуализации: **17.02.2017**

Our passion - your independence!