

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

7973 Голеностопный бандаж легкий



Действие

Поддерживает и согревает голеностопный сустав, обеспечивает усиление кровотока и быстрый разогрев мышц. Способствует предотвращению травм. Уменьшает скованность в суставе, облегчает или устраняет боль. Подходит для использования со спортивной обувью любого типа.

Показания

Легкая нестабильность в голеностопном суставе. Воспаление Ахиллова сухожилия, явления тугоподвижности в стопе и голеностопном суставе.
Профилактика при повышенных спортивных нагрузках, в период реабилитации после повреждений Ахиллова сухожилия.

Состав

Thermoprene® 1,5/3 мм.

Применение

- 1) Поместите бандаж на ногу.
- 2) Убедитесь, что выбрали подходящий Вам размер.

Важно!

- 1) Если у Вас есть вопросы о применении изделия, связывайтесь с импортером или дистрибьютором, осуществившим продажу.
- 2) Изделие не жаростойкое, избегайте воздействия температур свыше 120 °С.
- 3) Время использования изделий из Thermoprene® не должно превышать 3–4 часов.
- 4) Если у Вас аллергия на латекс или резину, перед использованием изделия рекомендуем проконсультироваться с врачом.
Состав изделия указан выше.
- 5) При наличии тепловой аллергии рекомендуем не использовать изделия, содержащие Thermoprene®.

Изделие не должно контактировать с жировыми и кислотными средствами, мазями и лосьонами. Это может привести к сокращению срока службы, прежде всего, текстильных элементов.

Инструкции по стирке

- 1) Стирать при температуре 40 °С.
- 2) Рекомендуется использовать сетчатый мешочек для стирки.
- 3) Расправьте изделие во влажном состоянии и высушите его вдали от отопительных приборов.

Гарантия

Изготовитель несет ответственность только в случаях применения изделия по его прямому назначению и при оговоренных условиях. Изделие испытано и сертифицировано по стандарту ISO.

Заявление о соответствии

Как изготовитель изделия Компания «ОТТО БОКК» берет на себя полную ответственность, заявляя, что изделие соответствует требованиям Директивы Евросоюза 93/42/ЕЕС.

