

ПАСПОРТ

Коляска инвалидная с электроприводом FS110A-46

Производитель: Фошан Донгфанг Медикал Эквипмент Мануфэктори (КНР)
Импортер: ООО «Мега-Оптим» (Россия)



Основные размеры и конструктивные характеристики:

Ширина сидения: 450мм,
Ширина общая: 630мм,
Высота: 920мм,
Длина: 1140 мм,
Высота спинки: 400мм,
Высота сидения: 520 мм,
Глубина сидения: 430 мм,
Передние колеса: 200x50мм
(литые)
Ведущие задние колеса: 320x55мм
(пневматические)
Грузоподъемность: 100 кг
Вес: 41 кг

Электрические характеристики:

Мотор: бесщеточный постоянного тока
Двигатель: 250 Вт x 2
Аккумулятор: 12В, 12Ah x 2
Зарядное устройство: переменный, 220В, 50 Гц, 5А
Максимальный выходной ток пульта управления: 50А

Основные технические характеристики:

Максимальная скорость: 6км/ч
Эффективность торможения: ≤ 1.5 м
Статическая устойчивость: $\geq 9^\circ$
Динамическая устойчивость: $\geq 6^\circ$
Минимальный радиус разворота: ≤ 1.2 м
Шины задних колес: 12 ½ x 2 ¼
Давление в шинах: 2,5 Bar (240 kPa)
Теоретический пробег на одной зарядке: 20 км
(для батареи стандартной конфигурации)

Кресло-коляска предназначено для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата по любым покрытиям. Электрическая коляска может использоваться для езды дома, на садовых дорожках и на гладких дорогах вокруг зданий. Согласно Правилам дорожного движения этот тип электрической коляски не является средством передвижения, он сконструирован исключительно для инвалидов и пожилых людей. Для управления электроколяской не нужно иметь водительские права, но необходимо соблюдать правила дорожного движения во время движения.

Гарантийные обязательства.

Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки и эксплуатации. Для того чтобы производитель мог обеспечить вас гарантией на данное изделие, вы должны соблюдать следующие правила. Покупайте электроколяску только у авторизованного дилера или у производителя. Во время использования руководствуйтесь данным руководством пользователя. Для обслуживания обращайтесь в специализированный сервисный центр.

Что включает в себя гарантия

На данное изделие, в период действия гарантии, в случае обнаружения производственных дефектов, предоставляется бесплатный ремонт, и бесплатное техническое обслуживание. После истечения гарантии предоставляется возмездное техническое обслуживание и ремонт на весь срок службы изделия.

На что гарантия не распространяется

- Субъективные ощущения, при отсутствии функциональных проблем.
- Износ и старение материалов (повреждения лакокрасочного покрытия, износ текстиля, резины и т.д.).

Негарантийные случаи

- Поломки в результате нерегулярных проверок.
- Ненадлежащее или неправильное техническое обслуживание.
- Эксплуатация отличная от указанной в руководстве или перегрузки
- Несанкционированные модификации конструкции
- Воздействие внешних факторов, таких как: сажа, фармацевтические препараты, птичий помет, кислотные дожди, град и т.д.
- Стихийные бедствия, такие как: тайфуны, наводнения, пожары, землетрясения и т.д.

Расходы, не покрываемые гарантией.

- Замена расходных материалов, таких как шин, предохранителей, пластиковых деталей, смазки и т.д.
- Расходы за осмотр, регулярные проверки, регулировки, смазку, чистку и т.д.
- Несанкционированные модификации
- Расходы в не авторизованных сервисных центрах

Обязанности пользователя

Чтобы не потерять гарантию, пользователи должны выполнять следующие обязанности:

- Проводить регулярное ТО и эксплуатировать кресло-коляску, как указано в руководстве.
- Проводить ежедневные проверки. Следовать рекомендациям в данном руководстве.

Условия гарантийного обслуживания

При наступлении гарантийного случая, гарантийное обслуживание предоставляется только при предъявлении в сервисном центре гарантийного талона (карты послепродажного обслуживания). При отсутствии гарантийного талона (карты послепродажного обслуживания) гарантийное обслуживание не производится.

Защита окружающей среды

В целях защиты окружающей среды каждый поврежденный или пришедший в негодность элемент кресла-коляски, должны быть возвращен на наш завод или передан на предприятие занимающееся утилизацией отходов, а не выброшен. Список предприятий занимающихся утилизацией отходов можно получить в органах местного самоуправления или в компетентных органах исполнительной власти.

Срок действия гарантии

- Гарантийный талон (карта послепродажного обслуживания) действителен со дня продажи изделия.
- Гарантия предоставляется сроком на один год.
- Расходные материалы (такие, как: комплект аккумуляторов, подушка сидения, шины, подножки, накладки на подлокотники и т.д.), не подпадают под действие гарантии

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № РОСС CN.МН08.Д19103,
срок действия с 17.06.2014г. по 16.06.2017г.

Регистрационное удостоверение ФС №2009/05006 от 27.08.2009г.

Производитель: Фошан Донгфанг Медикал Эквипмент Мануфэктори (КНР)

Импортер: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи _____

Дата изготовления _____

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон: **(495) 968-80-83**(многоканальный),

Адрес: г. Москва, поселение Первомайское, хутор Ильичевка, стр.3

www.mega-optim.ru

Подпись продавца _____

Подпись покупателя _____

У производителя есть право вносить изменения в данное руководство.