

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## 7726 Плечевой бандаж

REHNBAND 



### Действие

Обеспечивает стабилизацию, сохраняя полную амплитуду движений в плечевом суставе при физической нагрузке. Улучшает кровообращение в области плеча и надплечья, устраняет скованность в суставе и болевые ощущения.

### Показания

Используется при общей нестабильности плечевого сустава после растяжений/разрывов мягких тканей, вывихов ключицы. Бандаж может использоваться во время активной реабилитации плеча.

### Состав

Thermoprene® 3 мм.

### Применение

- 1) Наденьте бандаж на плечевой сустав.
- 2) Сведите плечи и застегните ленту на груди.

### Важно!

- 1) Если у Вас есть вопросы о применении изделия, связывайтесь с импортером или дистрибьютором, осуществившим продажу.
- 2) Изделие не жаростойкое, избегайте воздействия температур выше 120 °С.
- 3) Время использования изделий из Thermoprene® не должно превышать 3–4 часов.
- 4) Если у Вас аллергия на латекс или резину, перед использованием изделия рекомендуем проконсультироваться с врачом.  
Состав изделия указан выше.
- 5) При наличии тепловой аллергии рекомендуем не использовать изделия, содержащие Thermoprene®.  
Изделие не должно контактировать с жировыми и кислотными средствами,

мазями и лосьонами. Это может привести к сокращению срока службы, прежде всего, текстильных элементов.

### Инструкции по стирке

- 1) Застегните все застёжки «велькро».
- 2) Стирать при температуре 40 °С.
- 3) Рекомендуется использовать сетчатый мешочек для стирки.
- 4) Расправьте изделие во влажном состоянии и высушите его вдали от отопительных приборов.

### Гарантия

Изготовитель несет ответственность только в случаях применения изделия по его прямому назначению и при оговоренных условиях. Изделие испытано и сертифицировано по стандарту ISO.

### Заявление о соответствии

Как изготовитель изделия Компания «ОТТО БОКК» берет на себя полную ответственность, заявляя, что изделие соответствует требованиям Директивы Евросоюза 93/42/EEC.



