

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Кушетка для массажа серии Мастер

До начала эксплуатации подробно ознакомьтесь с настоящим Руководством!

ВВЕДЕНИЕ

Кушетка для массажа серии Мастер (далее по Руководству - кушетка) предназначена для проведения различных видов массажа, диагностических процедур, мануальной терапии, игло-терапии в различных учреждениях, массажных и косметических салонах.

Для того, чтобы исключить вероятность повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Руководства и общими требованиями безопасности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Габаритные размеры (ДхШхВ) ($\pm 5\%$), мм	1800x620x750
Размеры в сложенном состоянии (ДхШхВ) ($\pm 5\%$), мм	910x630x130
Грузоподъемность (не более), кг	200
Масса (нетто/брутто) ($\pm 5\%$), кг	11,5/12
Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ) ($\pm 5\%$), мм	670x950x180

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Устанавливайте кушетку на ровную горизонтальную поверхность;
- Не превышайте грузоподъемность кушетки;
- Обращайте внимание на положение пользователя на кушетке во время эксплуатации во избежание любых повреждений;
- Не подвергайте кушетку воздействию высоких температуре и влаги;
- Не используйте кушетку в местах с повышенной влажностью;
- Не допускайте контакта кушетки с электрическими приборами и проводами;
- Следует предохранять кушетку от ударов твердыми и острыми предметами;
- Запрещается эксплуатировать кушетку с не закрепленными деталями.

ОПИСАНИЕ

Кушетка двухсекционная складная с системой тросов (немецкие технологии), что позволяет устойчиво и уверенно проводить процедуры на данной кушетке.

Комбинация выверенного и надежного деревянного каркаса щитов с прочной и легкой алюминиевой подвеской.

Каркас кушетки обит высококачественным кожзаменителем на хлопковой основе.

Наличие отверстия для лица позволяет клиенту комфортно разместиться на ложе кушетки и максимально расслабит мышцы шеи.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для того, чтобы разложить кушетку необходимо:

Вскрыть упаковку и вытащить из неё кушетку. Установить кушетку на ножки, так чтобы ручка была сверху.

С торцевой стороны найдите замок предохраняющий от самостоятельного раскрытия кушетки, откройте его.

Плавное развести панели кушетки в стороны.

Когда кушетка раскрыта, то ее ножки находятся перпендикулярно кушетке.

Разложите кушетку до конца и поставьте ее на ножки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Все тросики должны быть натянуты, если это не так, проверьте места соединений тросов, с болтами. Бывают случаи, когда короткие тросики зацепляются за алюминиевые детали, их нужно ослабить и извлечь тросик.

Кушетка готова к эксплуатации.

Сборка кушетки проводится в обратном порядке.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проводите дезинфекцию кушетки в соответствии с требованиями ОСТ 42-21-2-85. Наружные поверхности кушетки обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств утвержденными в установленном порядке.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Кушетка в упаковке предприятия-изготовителя должна храниться в закрытом помещении при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Кушетку транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующим на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение кушетки без упаковки завода-изготовителя не гарантирует сохранность кушетки. Повреждения кушетки, полученные в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя, устраняются потребителем.

Кушетка не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация кушетки осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Кушетка _____ 1 шт

Руководство _____ 1 экз

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции кушетки, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Кушетка для массажа серии Мастер соответствует нормативно-технической документации признана годной для эксплуатации.

Изготовитель: ООО «Знак отличия»

142305, Московская область, г. Чехов, ул. Дорожная, стр. 2

Срок службы - не менее 4 лет.

Гарантийный срок на кушетку для массажа серии Мастер – 12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящего Руководства.