

1. Назначение

1.1 Кресло-стул с санитарным оснащением «Ortonica» TU 2 предназначено для больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, используется как передвижное санитарно-гигиеническое приспособление.

2. Основные технические характеристики

2.1 Ширина общая.....	54 см
2.2 Ширина сидения.....	41 см
2.3 Общая высота.....	98 см
2.4 Высота спинки.....	38 см
2.5 Грузоподъемность.....	130 кг
2.6 Масса.....	6,5 кг

3. Комплект поставки

3.1 Кресло-стул с санитарным оснащением «Ortonica» TU 2.....	1 шт.
3.2 Паспорт.....	1 шт.

4. Меры безопасности

4.1 Убедитесь в надежности закрепления всех соединений. Вовремя заменяйте изношенные резиновые наконечники опор. Не допускайте контакта кресла-стула с электрическими приборами и проводами.

5. Устройство

5.1 Рама кресла-стула изготовлена из металла, имеет полимерное покрытие. Кресло-стул собирается без использования инструмента. Пластмассовое судно с крышкой съемное. Съемная крышка, сиденье и ведро изготовлены из прочного пластика. Конструкция легкая, переносная. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию указанных моделей, не ухудшающих ее потребительских свойств.

6. Указания по эксплуатации

6.1 Используя кресло-стул как туалет, необходимо установить судно и поднять крышку сиденья.

7. Уход и обслуживание

7.1 Необходимо очищать поверхность изделия от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо.

7.2 Сиденье и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой.

8. Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем, гарантийный срок хранения 24 месяца.

8.3 Срок службы 6 лет.

8.4 **Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:**

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезд на препятствие, высотой более 4 см;
- перемещение в коляске на спущенных колесах;
- прокол камеры в шинах колес и т. п.

8.5 **Производитель:** «Джензианг Ашуре Медикал Экуипмент Ко.Лтд», Китай. Tel: 0086-511-88838555, 0086-511-88896286

8.6 **Импортер:** ООО «Реамед»

Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет:
ООО «Реамед»

Адрес : 394026 , г. Воронеж, Московский пр-т 11.

Тел: (473) 233-0-332

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: Кресло-стул с санитарным оснащением
«Ortonica» TU 2

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

Срок гарантии 12 месяцев

Дата продажи _____

Сервисное обслуживание приборов производится в ООО "Реамед",

Контактный телефон: 8(473) 233-03-32

Адрес: 394016, г. Воронеж, Московский проспект, 11

Кресло-стул с санитарным оснащением «Ortonica» TU 2

