

Модель коляски	Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 620
Гарантийный срок эксплуатации	1 год
Гарантийный срок на аккумуляторы (с даты продажи или передачи пользователю)	6 мес
Производитель	«Чжуншань А энд Джей Медикал Эквипмент Ко.,Лтд.», Китай, Zhongshan A & J Medical Equipment Co., Ltd., No.3, Shenghui South Road, Nantou Town, Zhongshan City, China
Импортер в России	ООО «Ортоника» Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3369 от 23.06.2021 года
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Адрес	394026 , г. Воронеж, Московский пр-т, 11
Телефон	8 (800) 707-44-52
По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться по телефону: 8-800-500-14-14	

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия	Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 620
Серийный номер	
Дата покупки (отмечается продавцом в гарантийном талоне)	
При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия	

В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления продавца и покупателя.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

 8 (800) 500-14-14

 zakaz@ortonica.ru
ortonica.ru

Яндекс  Маркет

Читайте отзывы о нас



 **ortonica**
Life in motion

КОЛЯСКА ИНВАЛИДНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
ORTONICA PULSE 620



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 620 предназначена для самостоятельного передвижения (в помещениях и на дорогах с твердым покрытием) инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и повреждениями нижних конечностей.

КОНСТРУКЦИЯ

- Откидные подлокотники
- Ручка для сопровождающего лица
- Многофункциональный джойстик
- Складная опора для ног
- Антипрокидыватели на колёсной опоре
- Удобная сумка на молнии для хранения вещей
- Компактна в сложенном виде
- Амортизаторы передних колёс

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая высота /мм	890-1050
Общая длина/мм	1040-1080
Общая ширина/мм	560
Высота спинки/мм	380
Ширина сиденья /мм	450
Глубина сиденья (регулируемая)/мм	470
Тип аккумулятора	Литиевый
Емкость аккумулятора	2*12 Ah
Мощность двигателя	2*200 W
Материал рамы	Алюминий
Ремни безопасности	Есть
Вес коляски/кг	26
Грузоподъемность/кг	120

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Коляска инвалидная с аккумулятором – 1шт.
Комплект аккумуляторов – 1шт.
Зарядное устройство - 1 шт.
Набор инструментов (гаечный ключ, шестигранник) - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Категорически запрещена эксплуатация кресла коляски без антипрокидывателей. При пересаживании следует заранее поднять подлокотник. Сопровождающие лица должны удерживать инвалидную коляску только за ручки для сопровождающего лица. При эксплуатации коляски старайтесь сохранить центр тяжести, слишком сильные наклоны могут привести к опрокидыванию или перевороту коляски. Запрещается передвигаться на коляске с электрическим приводом в дождливую погоду. Перед посадкой в коляску убедитесь в том, что давление в шинах правильное. Давление должно соответствовать маркировке на боковой поверхности покрышек.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Коляска поставляется в сложенном виде. Для того чтобы разложить коляску необходимо взяться за спинку и опору для стоп и потянуть в противоположные стороны.
- Установите аккумуляторы в боксы под сиденьем
- Соедините кабель контроллера с кабелем блока управления
- Подключите контроллер и электромоторы к блоку управления
- Проверьте давление в шинах
- Для начала движения, включите на джойстике кнопку «ON» и наклоните его вперед

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Необходимо очищать поверхность коляски от пыли и грязи
- Металлические поверхности протирать насухо
- Сиденье и спинку чистить универсальными моющими средствами с водой
- Один раз в месяц необходимо произвести:
 - проверку исправности тормозных механизмов;
 - проверку затяжки резьбовых соединений;
 - проверку давления в шинах колес.
- Своевременно заряжать аккумуляторные батареи

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем.

Изготовитель не несет ответственности в случае повреждений, возникших не по его вине, например:

- превышение грузоподъемности, указанной в настоящем паспорте;
- сколы и поломки деталей в результате сильных ударов о другие предметы;
- наезд на препятствие, высотой более 4 см;