

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

7725 Футболка компрессионная согревающая



Снабжена анатомически смоделированными согревающими вставками в области шеи, плеча, надплечья и поясницы.

Действие

Обеспечивает профилактический эффект, улучшение мышечной координации (проприоцептивный эффект), быстрый разогрев мышц в указанных зонах, уменьшая опасность травмы.

Состав

Thermoprene® 1,5 мм, CoolMax®.

Важно!

- 1) Если у Вас есть вопросы о применении изделия, связывайтесь с импортером или дистрибьютором, осуществившим продажу.
- 2) Изделие не жаростойкое, избегайте воздействия температур свыше 120 °С.
- 3) Изделие должно использоваться только для спортивных игр.
- 4) Время использования изделий из Thermoprene® не должно превышать 3–4 часов.
- 5) Если у Вас аллергия на латекс или резину, перед использованием изделия рекомендуем проконсультироваться с врачом.
Состав изделия указан выше.

- 6) При наличии тепловой аллергии рекомендуем не использовать изделия, содержащие Thermoprene®.

Изделие не должно контактировать с жировыми и кислотными средствами, мазями и лосьонами. Это может привести к сокращению срока службы, прежде всего, текстильных элементов.

Инструкции по стирке

- 1) Стирать при температуре 40 °С.
- 2) Рекомендуется использовать сетчатый мешочек для стирки.
- 3) Расправьте изделие во влажном состоянии и высушите его вдали от отопительных приборов.

