

ПАСПОРТ

Коляска инвалидная с электроприводом LK36B

Изготовитель: Чжаокинг Дингху Медикал Эквипмент Фэктори (КНР)
Импортер: ООО «Мега-Оптим» (Россия)



Основные размеры и конструктивные характеристики:

Длина 800 мм,
Ширина 570мм,
Высота 840мм,
Высота спинки -365мм,
ширина сиденья- 40см.
Колесная база: 450мм
Протектор: 550мм
Дорожный просвет: 100 мм
Радиус разворота: 750 мм
Вес: 22 кг
Нагрузка: 120 кг
Переднее колесо : 200х50 мм
(пневматические)
Задние колеса: 200мм X 50мм
(полиуретановые)

Электрические характеристики:

Мотор: бесщеточный постоянного тока (моторколесо)
Номинальное напряжение: 24В
Номинальная мощность: 150 Втх2
Модель аккумулятора: ИТП-24-08
Зарядное устройство: АС220 В, 50 Гц
Мощность: 8 А
Макс. Выходной ток: 2А
Макс. Выходной ток контроллера: 22А
Ток непрерывной работы: 5А
Регулятор скорости: бесступенчатый
Индикатор напряжения: Светодиодный

Основные технические характеристики:

Максимальная скорость: 6км/ч

Тормозные характеристики: $\leq 1.0m$ Максимальный уклон: 10°

Потребляемая мощность: 1.2кВт • ч/100 км

Продольная устойчивость: 20°

Поперечная устойчивость: 15°

Теоретический пробег на одной зарядке: 30 км

(для батареи стандартной конфигурации)

Кресло-коляска предназначено для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата по любым покрытиям. Электрическая коляска может использоваться для езды дома, на садовых дорожках и на гладких дорогах вокруг зданий. Согласно Правилам дорожного движения этот тип электрической коляски не является средством передвижения, он сконструирован исключительно для инвалидов и пожилых людей. Для управления электроколяской не нужно иметь водительские права, но необходимо соблюдать правила дорожного движения во время движения.

Гарантийные обязательства.

Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки и эксплуатации. Для того чтобы производитель мог обеспечить вас гарантией на данное изделие, вы должны соблюдать следующие правила. Покупайте электроколяску только у авторизованного дилера или у производителя. Во время использования руководствуйтесь данным руководством пользователя. Для обслуживания обращайтесь в специализированный сервисный центр.

Гарантийное соглашение

Гарантийные обязательства	Гарантийный период	Примечание
Рама	1 год	непреднамеренное повреждение
Двигатель	1 год на ремонт 1 месяц на замену	непреднамеренное повреждение
Литиевый аккумулятор	6 месяцев	непреднамеренное повреждение
Модуль управления	1 год	непреднамеренное повреждение
Джойстик	3 месяца	непреднамеренное повреждение
Быстроизнашивающиеся детали	не подлежат	шины, обивка сидения и спинки, подлокотники

Поиск и устранение неисправностей

№.	Проблема	Причина	Решение
1	Невозможно включить питание	Модуль управления питанием не подключен	Подключить модуль управления
		Модуль управления и пульт управления не соединены	Соединить при помощи 4-пинового разъема
		Низкий заряд батареи	Зарядите батарею
2	Индикация неисправностей на пульте управления	№.1 Мигает красный индикатор: низкий заряд батареи	Зарядите батарею
		№.2 Мигает красный индикатор: Джойстик без сигнала связи	Проверьте 4-пиновый разъем или замените джойстик
		№.3 Мигает красный индикатор: Заряжается	Во время зарядки вождение запрещено.
		№.4 Мигает красный индикатор: Двигатель не подключен	Вставьте кабель двигателя и закрепите соединение
		№.5 Мигает красный индикатор: Электромагнитный тормоз не подключен	Вставьте кабель двигателя и закрепите соединение
3	Отклонения в работе и шумы двигателя во время начала движения	Установлен слишком низкий предел максимальной скорости	Установить выше
		Выход из строя одного из двигателей	Замените двигатель
4	Сокращение пробега	Не соответствующие условия окружающей среды	Это нормальные характеристики батареи
		Движение по неровной поверхности или склону	Потребление энергии увеличивается – это нормально
		Емкость батареи уменьшилась	Замените батарею
5	Неисправности при зарядке аккумулятора	Индикатор зарядки не горит	Замените батарею
		Зеленый индикатор горит постоянно	Проверьте 4-пиновый разъем или замените батарею
		Время зарядки сократилось	Емкость уменьшилась, замените батарею.

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № РОСС СN.АГ81.Д01125,
срок действия с 14.12.2016г. по 13.12.2019г.

Изготовитель: Чжаоквинг Дингху Медикал Эквипмент Фэктори (КНР)

Импортер: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи _____

Дата изготовления _____

Поставщик: ООО «Мега-Трейд» (Россия)

Контактный телефон: **(495) 777-36-00** (многоканальный),

Адрес: 143396, г. Москва, поселение Первомайское, хутор Ильичевка, стр.3

Подпись продавца _____

Подпись покупателя _____

У производителя есть право вносить изменения в данное руководство.