

Инвалидная кресло-коляска для больных ДЦП

ПАСПОРТ

Производитель: Фошан Донгфанг Медикал Эквипмент Мануфэктори (КНР)
Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Модель: FS204BJQ-46



Основные технические характеристики:

Ширина сидения, мм	440
Ширина в рабочем состоянии, мм	660
Диаметр заднего колеса, мм	590
Диаметр переднего колеса, мм	200
Высота сидения, мм	530
Высота от пола до спинки, мм	1130
Грузоподъёмность, кг	150
Масса, кг	41,4

Комплект поставки

1. Кресло-коляска - 1 шт.
2. Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Кресло-коляска предназначено для передвижения в помещениях и на дорогах с твердым покрытием для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата вследствие заболевания ДЦП. Рама изготовлена из стали, окрашенной методом порошкового напыления. Обивка сидения из искусственной кожи.

Меры безопасности

- при посадке пользователя в кресло-коляску и высадке из неё колеса должны быть поставлены на тормоза
- категорически запрещается вставать на подножки
- запрещена эксплуатация изделия с неисправными тормозами

Внимание! Перед эксплуатацией кресла-коляски необходимо проверить надежность крепления деталей.

Характеристики кресла-коляски

- Ширина сидения 440 мм
- Регулируемая высота подножек
- Регулируемый угол наклона подножек
- Регулируемая длина подножек
- Регулируемая высота подголовника
- Два ручных тормоза
- Два стояночных тормоза
- Регулируемый угол наклона спинки (рычаг рядом со стояночным тормозом)
- Спинка раскладывается до горизонтального положения
- Два антипрокидывателя
- Карман для личных вещей
- Задние быстросъёмные литые колеса
- Регулируемые по высоте мягкие упоры под голень
- Мягкие регулируемые подлокотники
- Столик

Обслуживание и уход при эксплуатации

При эксплуатации кресло-коляска требует определённого технического ухода. Обивку из искусственной кожи необходимо чистить тёплой водой с применением мягких моющих средств.

При необходимости сидение, спинку и подлокотники следует протирать (дезинфицировать) влажной тряпкой, смоченной в 0,5 - 1,0% растворе хлорамина. Механизм складывания необходимо периодически (не реже одного раза в месяц) смазывать машинным маслом. Необходимо помнить, что поверхность металлических деталей кресла-коляски имеет декоративно-защитное покрытие и поэтому требует к себе бережного отношения. Следует предохранять поверхности металлических деталей от ударов твёрдыми и острыми предметами.

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев. Срок хранения – 3 года.

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № РОСС CN.PC52.Д01143,
срок действия с 03.05.2017 до 02.05.2020г.

Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2009/05010
от 17.02.2014г., срок действия не ограничен

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи _____

Дата изготовления _____

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон: **(495) 968-80-83, (916) 503-12-29**

Адрес: 143396, г. Москва, поселение Первомайское, х. Ильичёвка, стр. 3.

Подпись продавца _____

Подпись покупателя _____