



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

### Опора для ходьбы ОХД-314.1. «Я Могу!» ХОДУНКИ-МАНЕЖ

Производитель ООО НПП «ДВМ», Россия

Изделие медицинского назначения изготовлено согласно документации производителя, полностью укомплектовано согласно действующей спецификации. Комплектующие в соответствии со стандартной комплектацией изделия - см. инструкцию на изделие.

**Срок гарантийного обслуживания установлен производителем и составляет 24 месяца с даты продажи.**

Артикул: 314.1.01

\_\_\_\_\_

отметка ОТК

Дата продажи: “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_

Печать организации,  
осуществляющей продажу

ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»  
620035, Россия, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 8-1  
Выставочный зал: г.Екатеринбург, ул. Кислородная, 8-А, строение «К»  
тел/факс: (343) 383-11-95, 383-11-96 e-mail: info@dvm-reab.ru

[www.dvm-reab.ru](http://www.dvm-reab.ru)



ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»


## ПАСПОРТ

### Руководство по эксплуатации, гарантийный талон

#### Опора для ходьбы ХОДУНКИ ОХД-314.1.

арт. 314.1.01.; арт. 314.1.02

Руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования изделия как в условиях стационара, так и в домашних условиях.

 **Сохраняйте данное руководство и паспорт изделия на всё время эксплуатации.**

#### Общие сведения


Опора для ходьбы - ходунки «Я Могу!» изготовлены в соответствии с ТУ 9398-001-91079148-2011, регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11517. До начала эксплуатации изучите данное руководство. При возникновении вопросов относительно эксплуатации изделия, качества и особенностей изделия, просим обращаться к официальным представителям производителя в Вашем регионе или непосредственно в ООО НПП «ДВМ» по телефонам : (343) 383-11-95 (96). Для производства изделия использованы материалы, безопасность которых гарантируется сертификатами качества : фанера высококачественная экологически чистая, металлическая профильная труба со стойким цветным порошковым покрытием, винилискожа, поролон, фурнитура. Деревянные части опоры покрыты экологически чистой смесью натуральных масел с твердым воском, стойкой к обработке традиционными средствами.

#### Краткое описание и назначение

Опора для ходьбы ОХД-314.1. «Я Могу!» - техническое средство реабилитации для детей инвалидов. Представляют собой ходунки-манеж на металлической колесной раме, с мягкой обоймой для туловища, съемным регулируемым сидением-гамаком. Предназначены для обучения ходьбе, развитию навыков равновесия и отработки навыков ходьбы у детей с низким уровнем физического развития, неврологическими патологиями в том числе ДЦП, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Опора для ходьбы - ходунки-манеж могут использоваться как в условиях специализированных учреждений, так и в домашних условиях. Опора для ходьбы ОХД-314 «Я Могу!» представляет собой металлическую раму на самоориентирующихся колесах, со съемной регулируемой по высоте обоймой для туловища. Обойма для туловища оснащена мягкой отшивкой. Сидение-гамак крепится к обойме для туловища при помощи регулировочных ремней.

#### Технические характеристики

Высота обоймы для тела, регулируемая	56 – 76 см
Шаг регулировки обоймы для тела	5 см
Диаметр обоймы для тела	30 см
Габаритные размеры (Д x Ш)	77 x 72
Максимальная нагрузка (максимальный вес ребенка)	40 кг
Вес изделия	6 кг

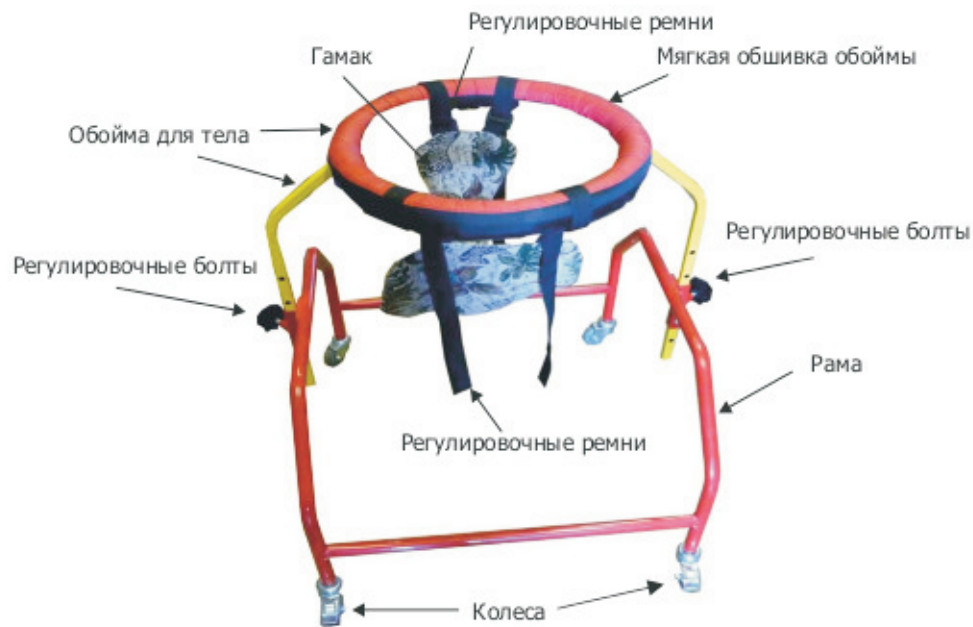

### Требования к безопасности

Опора для ходьбы ОХД-314.1. «Я Могу!» предназначена для использования в помещениях, не пытайтесь использовать изделие на улице. Не допускается эксплуатация опоры в помещениях с непрочным полом и на поверхности, имеющей значительные неровности.



**Перед каждым использованием проверяйте опору на наличие серьезных повреждений. При обнаружении таковых и при сомнениях в возможности использования изделия, ни в коем случае не используйте опору. В случае обнаружения неисправности, не пытайтесь исправить самостоятельно, обратитесь за консультацией к дилеру, у которого приобретали изделие или непосредственно в сервисную службу производителя по тел.: (343) 383-11-95 ( 96).**

Ходунки-манеж сконструированы таким образом, что возможность падения ребенка исключена, однако не следует надолго оставлять ребенка-инвалида, даже если он находится в ходунках, одного в помещении. При каждом высаживании ребенка в ходунки-манеж тщательно проверяйте все крепления, в особенности крепления регулирующих ремней, на которых держится гамак. Не забывайте о быстром процессе роста ребенка - раз в две недели проверяйте высоту закрепления гамака и раз в месяц - высоту установки обоймы для тела.

### Правила хранения и ухода.

До эксплуатации изделие необходимо хранить в упаковке. Перед первой эксплуатацией следует произвести проверку комплектности изделия, установить обойму для тела, закрепить её на необходимой высоте регулировочными болтами. Затем закрепить гамак в наиболее удобное для ребенка положение при помощи регулировочных ремней. Рекомендуемые условия хранения: в сухом помещении при температуре воздуха от - 5 до +30 градусов Цельсия. Срок хранения - не более 12 месяцев с даты выпуска изделия. Дата выпуска указана в гарантийном талоне. При транспортировке изделия запрещается подвергать ударным нагрузкам. Изделие нуждается в тщательном уходе. Периодически следует очищать рабочие поверхности от возможных загрязнений. Рекомендуется после каждого использования опоры протирать поверхности влажной тряпочкой. При наличии серьезных загрязнений - использовать разрешенные к применению гигиенические и моющие средства. Запрещается погружать изделие или части изделия в воду. Покрытие металлических и деревянных частей изделия является стойким, но при этом следует избегать воздействия твердыми и острыми предметами на окрашенные поверхности. Изделие обладает длительным сроком эксплуатации и надежностью, однако, если вы заметили неисправность, прекратите или не начинайте использование изделия и не пытайтесь исправить неисправность самостоятельно. Обратитесь к дилеру, у которого было приобретено изделие или в ближайший магазин, торгующий товарами для инвалидов.

### Гарантийные обязательства производителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие опоры требованиям технических условий при соблюдении требований к эксплуатации, транспортировке и хранению, установленных в настоящем Руководстве.

Гарантийный срок службы установлен равным 24 месяца со дня выдачи опоры пользователю (либо приобретения пользователем). В течение гарантийного срока в случае неисправности предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет опору либо её составные части при соблюдении владельцем опоры требований к её эксплуатации, транспортировке и хранению.

Предприятие-изготовитель не несёт вышеуказанных гарантийных обязательств в случае ненадлежащей эксплуатации опоры (нарушении инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию и уходу). Предприятие-изготовитель не несёт вышеуказанных гарантийных обязательств при появлении на опоре трещин и изломов, если они вызваны недопустимыми ударными нагрузками, о чем свидетельствует наличие вмятин и трещин.



**ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»**

620035, Россия, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 8-1

Выставочный зал: г.Екатеринбург, ул. Кислородная, 8-А, строение «К»

тел/факс: (343) 383-11-95, 383-11-96 e-mail: info@dvm-reab.ru

[www.dvm-reab.ru](http://www.dvm-reab.ru)