

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА

РЕЙСЕР™



CE

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА ОБИВКИ

AKCES[®]**MED**



ВНИМАНИЕ! Производитель несет ответственность за правильное функционирование изделия исключительно в случае покупки его у квалифицированного сотрудника фирмы Akces-Med Sp. z o.o или в специальном магазине медицинских изделий.



Изделие медицинского назначения кл. 1 – удовлетворяющее все требования Европейской Директивы (93/42 / EWG) в соответствии с Положением о медицинских изделиях. Производитель предоставил декларацию соответствия ЕС. Обозначение производителя в Управлении по регистрации лекарственных средств изделий медицинского назначения и биоцидов **PL/CA01 04088/W**

Фирма AKCES-MED имеет внедренную систему управления качеством согласно с нормами ISO 13485 в процессе проектирования всей продукции , продажи и сервиса.

Система сертифицирована Det Norske Veritas.

AKCES[®]MED

1. СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБИВКИ



1. ОБИВКА



2. КАРКАС



3. МЕЖБЕДРЕННЫЙ
КЛИН



4. БАРЬЕР



5. ПОДУШКА СИДЕНИЯ



6. ПОДГОЛОВ




7. ЗАСЛОН МЕХАНИЗМА
СКЛАДЫВАНИЯ КОЛЯСКИ



8. БОКОВЫЕ ЗАСЛОНЫ



9. ЖИЛЕТ

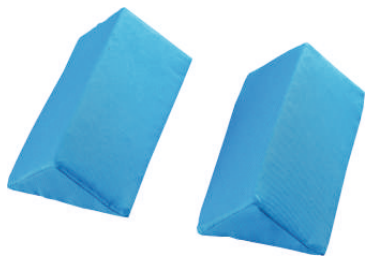


10. БОКОВЫЕ ПЕЛОТЫ



11. КРЕПЕЖНЫЙ

12. ПРУЖИНЫ

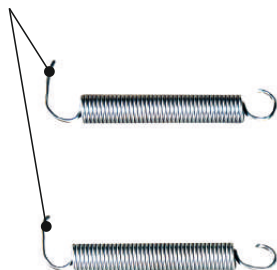

**13. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
СТЕРЖНИ NR 1**



14. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕРЖНИ NR 2



15. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕРЖНИ NR 3



2. ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА ОБИВКИ

Чтобы одеть обивку на коляску Racer следует:

ШАГ 1. Одеть **ОБИВКУ (1)** на **КАРКАС КОЛЯСКИ (2)**, на спинку и натянуть вниз до упора



ШАГ 2 Установить **МЕЖБЕДРЕННЫЙ КЛИН (3)** вложив его в отверстие в обивке сидения коляски



Затем следует прикрутить клин под сидением с помощью ручки и шайбы.



ШАГ 3. В отверстие обивки, находящееся спереди сидения, следует вложить стержень NR 3 (15).



Стержень следует поместить таким образом, чтобы его изгибы были направлены вниз.




ШАГ 4. Натянуть обивку и поместить изгибы **СТЕРЖНЯ NR.3 (15)** в два отверстия находящиеся с другой стороны рамы сидения.



ШАГ 5. Поместить **СТЕРЖЕНЬ NR.1 (13)** в отверстие в обивке находящееся с боку коляски. Действие повторить с другой стороны коляски.



Стержни следует вкладывать таким образом, чтобы их изгибы были направлены вниз.

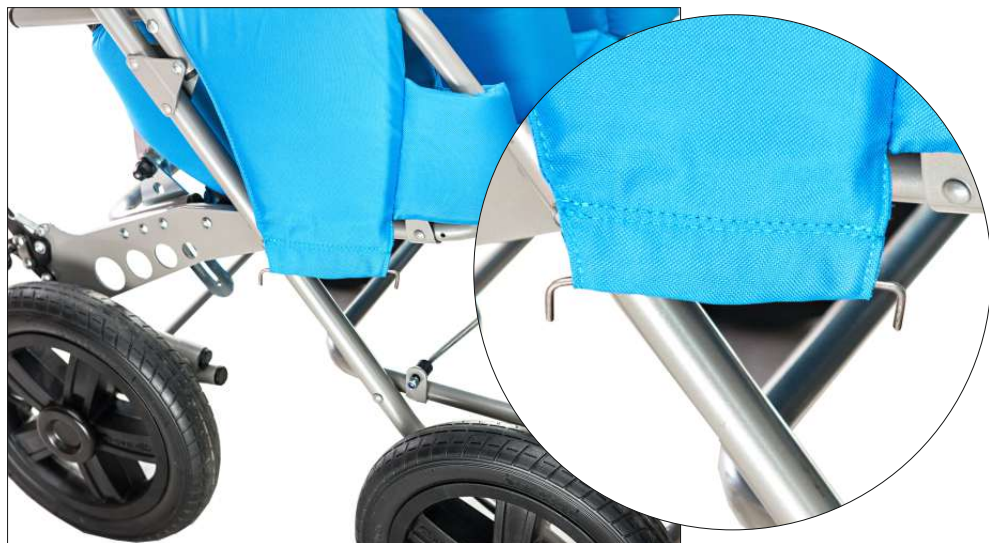

ШАГ 6. Натянуть обивку и поместить изгибы **СТЕРЖНЯ NR.1 (13)** в два отверстия, находящиеся с другой стороны рамы сидения. Действие повторить с другой стороны коляски.



ШАГ 7. Поместить **СТЕРЖЕНЬ NR. 2 (14)** в отверстие в обивке, находящееся в задней части обивки.



ШАГ 8. Зацепить **ПРУЖИНИ (12)** за **СТЕРЖЕНЬ NR. 2 (14)** находящийся в отверстии обивки. Пружиной следует пробить обивку около 9 см от края обивки по обеим сторонам.





ШАГ 9. Зацепив пружины (12) следует загнуть их наконечники с помощью плоскогубцев.



ШАГ 10. Натянуть и поместить наконечники **ПРУЖИН (12)** в отверстия, находящиеся в задней раме каркаса коляски.



ШАГ 11. Переложить **КРЕПЕЖНЫЙ РЕМЕНЬ (11)** через раму спинки коляски, как указано на фото ниже. Конец ремня следует вложить в регулятор. С другим концом ремня поступить также.








ШАГ 12. Для установления **ЖИЛЕТА (9)** следует в первую очередь вынуть четыре ремня, находящиеся за верхней и нижней частью обивки спинки



ШАГ 13. Ремни следует продеть через четыре пряжки жилета.

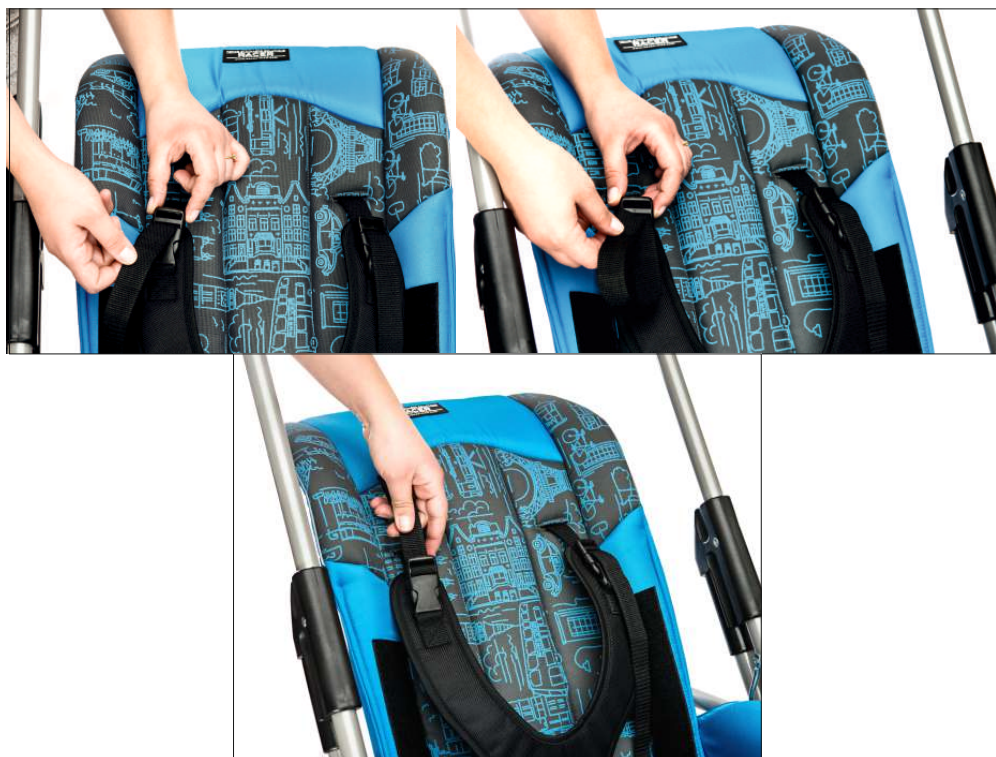

ШАГ 14. Установить БОКОВЫЕ ЗАСЛОНЫ ГОЛЕНЕЙ (8)



ШАГ 15. Установить ПОДГОЛОВНИК (6)



ШАГ 16. Установить БОКОВЫЕ ПЕЛОТЫ (10)



ШАГ 17. Установить ПОДУШКУ СИДЕНИЯ (5)



ШАГ 18. Установить БАРЬЕР (4)





ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ



Akces-MED. Sp. z o.o.
ul. Leszka Czarnego 3
35-615 Rzeszów
tel. (17) 864 04 70

www.akces-med.com


e-mail: akces-med@akces-med.com

Уполномоченный Дилер



Дата издания: 18.12.2014

Дата последней
актуализации: 18.12.2014

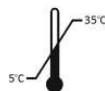

Akces-MED Sp. z o.o. оставляет за собой право введения изменений в содержание инструкции в области технических характеристик изделия и торговой информации без предварительного предупреждения