



АРМЕД®

NON PROGREDI, EST REGREDI

ПАСПОРТ

И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*До начала эксплуатации подробно
ознакомьтесь с настоящим паспортом!*

Ячеистый



Трубчатый



Матрас противопролежневый Armed

www.armed.ru

ВВЕДЕНИЕ

Матрас противопрележневый Armed: трубчатый, ячеистый (далее по паспорту - матрас) - представляет собой противопрележневую систему, состоящую из матраса и компрессора (ромбовидные ячейки, трубы).

Для того, чтобы исключить вероятность травмирования пациента или повреждения оборудования не пренебрегайте рекомендациями данного Паспорта и общими требованиями безопасности.

ПОКАЗАНИЯ

- Ограниченные способности к самообслуживанию и передвижению;
- Истощение/ожирение;
- Сахарный диабет;
- Нарушения функций кровообращения, дыхания, пищеварения, выделения, кроветворения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Травмы позвоночника и спинного мозга;
- Шейные и скелетные вытяжения.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Запрещается прыгать и ходить по матрасу, в том числе и детям;
- Эксплуатируйте матрас только в чехле во избежание потери его свойств;
- Берегите матрас от попадания жидкостей и химикатов;
- Переворачивайте матрас раз в 1-3 месяца и раз в год меняйте положение голова-ноги. Это необходимо для восстановления слоев настила в процессе эксплуатации;
- Используйте матрас на сплошной ровной горизонтальной поверхности или на качественном ортопедическом основании с упругими ламелями;
- Запрещается сгибать, сворачивать или складывать матрас.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Матрас	Ячеистый	Трубчатый
Бактерио-статическое покрывало	-	да
Состав	ПВХ	нейлон
Размер ($\pm 10\%$), мм	1900x900x65	1920x900x95
Вес без компрессора ($\pm 10\%$), кг	1,9	4,7
Вес с компрессором нетто/брутто ($\pm 10\%$), кг	3,2/3,8	6/6,5
Макс. нагрузка, кг	120	150
Пролежни (степень)	средняя	высокая

ОПИСАНИЕ

Матрас может комплектоваться антисептическим покрывалом по усмотрению производителя.

Возможна комплектация матраса компрессором с режимом «Статика».

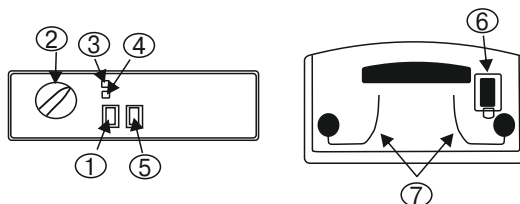

1. кнопка включения;
2. регулятор давления;
3. индикатор нормального давления (зеленая лампочка);
4. индикатор пониженного давления (желтая кнопочка);
5. кнопка статической

функции (при наличии функции «Статика»); **6.** воздушный фильтр; **7.** крючки для подвешивания

Питание 220 В, 50Гц **Потребление Мощности:** не более 13,5 ВА **Ток:** 0,06 А **Класс безопасности:** Класс II **Защита от электричества:** Тип В **Рабочее давление:** 17 ± 1 кПА **Длительность цикла:** 12 мин

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Установите насос на плоскую, жесткую поверхность или подвести на поручни ножного отдела кровати, используя крючки на корпусе насоса.
2. Матрас расстелите на матрас кровати, загнув свободные концы под него. Вход для соединительных трубок должен быть расположен в ножном отделе кровати.
3. Подсоедините насос к матрасу с помощью соединительных трубок.
4. Убедитесь, что трубки не заломлены и не проходят под матрасом.
5. Включите насос (положение «ВКЛ»). Воздух начнет поступать в матрас.
6. Застелите матрас хлопковой простыней.

Матрас готов к эксплуатации.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Уложите пациента.
2. Отрегулируйте давление, выбрав соответственно «MIN» или «MAX» в зависимости от веса пациента и комфортности. Оптимальный вариант когда между телом пациента и ненадутой частью матраса проходят два пальца руки.
3. Для включения статической функции установите кнопку 5 в положение «ВКЛ», при этом все ячейки надуются одновременно, обеспечивая статичную поверхность матраса. Это позволяет с легкостью менять положение пациента при проведении процедур или кормлении.
4. При выключении статической функции система работает в обычном режиме.

ВНИМАНИЕ



РЕЖИМ РАБОТЫ НАСОСА КРУГЛОСУТОЧНЫЙ

ЧИСТКА

НАСОС

Проверяйте воздушный фильтр 1 раз в месяц. В случае загрязнения помойте фильтр мягким моющим средством, высушите и установите на место. Корпус насоса протирайте тканью, смоченной 25% раствором нашатырного спирта.

МАТРАС

Рекомендуем проводить сухую чистку с помощью пылесоса. Сушите матрас на воздухе, не применяя утюга. Производите дезинфекцию матраса в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. Наружные поверхности матраса обрабатывают способом протирания дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

ВИДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Типы поломок		Проблемы	Методы починки
Матрас не надувается	Индикатор включен	Отсоединена трубка	Присоединить ее
		Матрас проколот	Заклейте дыру
	Индикатор выключен	Не подключено питание	Подключите питание
Матрас надувается не полностью	Матрас очень мягкий	Давление минимально	Поверните диск направо
		Матрас трещит	Разверните его и вымойте
		Воздушный фильтр заблокирован из-за долгого использования	Продуйте его

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Матрас в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности до 80%.

В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Матрас транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444-92 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортировка и хранение матраса без упаковки завода-изготовителя не гарантирует его сохранность. Повреждения матраса в результате транспортировки или хранения без упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.

Матрас не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при утилизации.

Утилизация матраса осуществляется отдельно по группам материалов, согласно соответствующей нормативной документации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Трубка соединительная (сдвоенная) _____ 1 шт.
2. Насос воздушный (компрессорный) _____ 1 шт.
3. Матрас _____ 1 шт.
4. Паспорт _____ 1 экз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции матраса, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Матрас противопрележневый Armed: ячеистый, трубчатый соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/07068 действительно с 09.06.2010 г

Изготовитель: Jiangsu Dengguan Medical Treatment Instrument Co., Ltd.,

No.17, Danfeng West Road, Jintan City, Jiangsu Province, 213200, China

«Джиангсу Дэнгуан Медикал Тритмент Инструмент Ко., Лтд.»,

№ 17 Данфенг Вест Род, город Джинтан, провинция Джангсу, 213200, Китай

Дистрибьютор: ООО «Представительство ЮЮ Медикал»

199106, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21. корп. 3, лит. А, пом. 13-Н, тел.: (812) 702-73-02

Срок службы - не менее 3 лет.

Гарантийный срок на матрас противопрележневый Armed: ячеистый, трубчатый –12 месяцев с даты продажи при выполнении требований настоящей инструкции.

На быстроизнашивающиеся части и расходные материалы гарантия не распространяется.

Доставка в сервисный центр и обратно осуществляется за счет клиента.

Сервисный центр: ООО «Представительство ЮЮ Медикал»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 21, корп. 3, лит. А, пом. 13-Н

Телефоны сервисных центров:

г. Москва (495) 989-12-89

г. Санкт-Петербург (812) 702-73-02

г. Екатеринбург (343) 357-33-61