

**ХОДУНКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 10 ЛЕТ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
ФУНКЦИИ
модель “ REMY ”**

Паспорт



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ролляторы для детей от 3 до 10 лет с нарушениями двигательной функции. Предназначены для обучения ходьбе в основном в рамках программы реабилитации, но благодаря привлекательному дизайну, яркой и веселой расцветке подходят также для передвижения по дому или в школе. Ребенок воспринимает ходунки как обычную игрушку с колесами.

Когда дети с нарушением двигательных функций двигаются в ролляторах, они часто падают назад и у них перекрещиваются ноги: Remy имеет прогрессивный дизайн и особую конструкцию, созданную специально для того, чтобы избежать этих проблем и помочь ребенку научиться ходить правильно. Все настройки осуществляются легко и быстро; роллятор можно адаптировать к изменению роста и возможностей ребенка, чтобы он чувствовал себя комфортно и получал правильную поддержку. Система оснащена набором опций и опор, которые обеспечивают ребенку полную безопасность во время ходьбы и побуждают его делать первые шаги, играть и общаться с друзьями.

Широкое и открытое основание облегчает доступ к Remy из кресла или другого средства реабилитации, а значит, перемещение из одного устройства в другое проходит максимально безопасно.

Внешняя обивка опоры имеет мягкую подкладку из дышащего материала, ручки изготовлены из резины - ребенку удобно и легко за них держаться независимо от того, сколько времени он проводит в ходунках.

FUMAGALLI

... МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАС

«Фумагалли» – это итальянская компания, которая, с одной стороны, помогает людям с ограниченными возможностями вести полноценную жизнь в обществе, а с другой - помогает обществу заботиться о таких людях.

«Фумагалли» является флагманом рынка средств реабилитации в Италии и других странах, развивая культуру продаж, которая объединяет высокое качество продукции с заботой и вниманием к «особенным» людям.

Компанию «Фумагалли» всегда отличала глубокая заинтересованность и активное участие в решении проблем, связанных с ограниченными возможностями, а также

исследовательская работа и внедрение инноваций. Отличительной чертой компании является яркий, неординарный дизайн, полностью разработанный в Италии, и постоянная забота об эстетической стороне продукции.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Вся продукция «Фумагалли» производится в Италии, ее неизменное качество подтверждено сертификатом ISO 9001.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- стальная рама с 4 колесиками: зафиксированного переднего и заднего колеса и боковых роликов, облегчающих движение.
- антинаклонное устройство
- колеса с тормозами
- грудная опора
- опора предплечья
- безопасное седло
- опора для таза.

Благодаря всем этим деталям ребенок может совершенно спокойно опираться на роллятор, отдыхать и концентрироваться на обучении ходьбе.


Регулировка высоты, ширины и угла наклона позволяет максимально точно настроить общие параметры ходунков и различные опоры с учетом индивидуальных особенностей и возможностей ребенка

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ REMY

Когда реабилитационная программа ребенка предусматривает тренировку навыка ходьбы, необходимо использовать устройство, с помощью которого можно совершать поступательные движения без риска падения, сохранять равновесие и чувствовать себя при этом в безопасности. Remy помогает ребенку двигаться вперед, а, следовательно, облегчает развивать навык ходьбы. Поскольку основная грудная опора, оснащенная различными фиксаторами, наклонена вперед, центр тяжести ребенка смещается в нужном направлении, что очень важно с точки зрения биомеханики. Это смещение облегчает движение и компенсирует неспособность ребенка самостоятельно перемещать свой центр тяжести вперед, чтобы сделать шаг. В таком положении даже ребенок с патологией разгибательной группы мышц, может (хотя бы минимально) задействовать нижние конечности и пользоваться важнейшим функциональным преимуществом ходьбы: исследовать окружающее пространство - а это дает малышу эмоциональный и физиологический опыт, необходимый для психомоторного развития.



КАРТА РАЗМЕРОВ

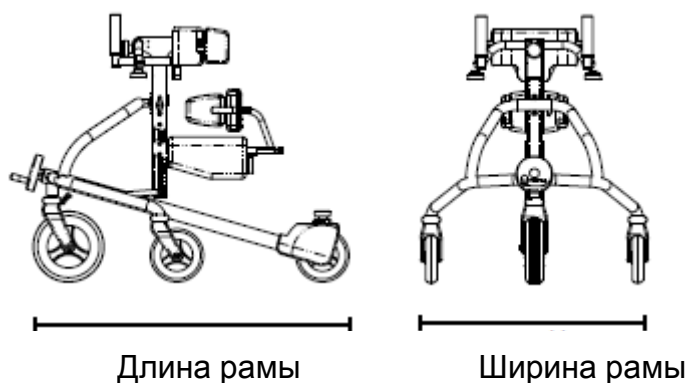

ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕР 1	РАЗМЕР 2	РАЗМЕР 3
Ширина рамы	64,5	78	100
Длина рамы	90	105	125
Высота мин-макс	62-82	78-98	94-114
Вес, кг	15	18	22
Грузоподъемность, кг	35	45	55
Размеры даны в сантиметрах			

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Для продления срока эксплуатации и соблюдения мер безопасности советуем придерживаться следующих рекомендаций:

- не превышайте максимально допустимую нагрузку (см. карту размеров)
- не оставляйте ребенка в ходунках без присмотра, даже если он пристегнут ремнями, и ходунки стоит на тормозе;
- все пластмассовые и рамочные части должны чиститься только обычными домашними чистящими средствами;

- мягкое сидение и другие тканевые дополнительные принадлежности могут стираться при температуре воды 40°. В стиральной машине данные изделия можно стирать только в специальном мешке или наволочке. В большинстве случаев достаточно просто протереть влажной тряпкой.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- 1) Гарантия на ходунки на производственные дефекты предоставляется на 1 год.
- 2) Во время действия гарантии некондиционные или бракованные детали ремонтируются или заменяются при предоставлении товарных документов и письменной рекламации бесплатно.
- 3) Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьими лицами без предварительного согласия фирмы-изготовителя.
- 4) Гарантия не распространяется на те дефекты, которые возникли в результате естественного износа или несоответствующего использования ходунков.
- 5) Гарантия прекращает свое действие, если при ремонте использовались не оригинальные запасные части.
- 6) Гарантия также прекращает свое действие, если монтаж оригинальных деталей или конструктивные изменения проводились не уполномоченной изготовителем фирмой или не самим изготовителем.
- 7) Во время действия гарантии заменяемые детали являются собственностью фирмы-изготовителя.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:



Fumagalli srl
Piazza Puecher 2
22037 Ponte Lambro (CO)
Tel. (+39) 031 33 56 811
Fax (+39) 031 622 111
www.fumagalli.org

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РОССИИ:



ГК «Доброта.ру»
Тел. 8(495)531-33-00
Факс 8(495)531-33-00
www.dobrota.ru